

Nájezdové rampy PONDUS

Uživatelská příručka



CE

1 Rampy Pondus

Obecné informace

Vážení zákazníci,

tato uživatelská příručka obsahuje popis zdravotnického prostředku a důležité pokyny pro zabezpečení správného a bezpečného používání výrobku. Před použitím je důležité si příručku pečlivě prostudovat. Obzvláště důležité je prostudovat si a dodržovat bezpečnostní požadavky.

Společnost REHASENSE své výrobky neustále vyvíjí a vyhrazuje si proto právo na změnu parametrů a funkcí výrobků bez předchozího upozornění.

V případě dotazů se prosím obraťte přímo na Vašeho prodejce. Kontaktní informace naleznete na poslední stránce této příručky.

2 Rampy Pondus

Indikace & Účel použití

Rampy jsou zdravotnickým prostředkem určeným výhradně pro asistenci uživatelům invalidního vozíku nebo skútru. Rampy umožňují průjezd zvýšených míst (např. schody nebo obrubníky) s nebo bez pomoci třetí osoby. Rampy tímto umožňují osobám sedícím na vozíku vjíždět do nebo vyjíždět z budov, nastupovat do vozů, autobusů apod. Rampy lze použít ve vnitřním i venkovním prostředí. Jakýkoli jiný způsob použití je zakázaný.

V případě dotazů se prosím obraťte přímo na Vašeho distributora nebo výrobce.

3 Rampy Pondus

Bezpečnostní informace

Zajistěte, aby všechny osoby, které zařízení používají, si přečetly tuto příručku a měly ji k dispozici. Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli škody a/nebo zranění způsobené nedodržením pokynů v uživatelské příručce.



Omezení použití

- Používejte pouze výrobek, který je v bezvadném stavu.
- Pokud objevíte jakékoli vady, okamžitě kontaktujte Vašeho prodejce.
- Věnujte pozornost informacím na výrobním štítku.
- Zajistěte, aby všechny osoby, které zařízení používají, si přečetly tuto příručku a měly ji k dispozici. Výrobce nepřijímá odpovědnost za jakékoli škody způsobené nedodržením uživatelské příručky.
- Rampy nesmí být zatěžovány nad maximální zátěž stanovenou v části Technické údaje a na štítku.
- Rampu lze použít pouze pro maximální sklon (maximální výšku schodu) v poměru k její délce. Tyto údaje naleznete v části Technické údaje a na výrobním štítku.
- Rampy používejte pouze k účelu, ke kterému jsou určeny.
- Neprovádějte na rampách žádné konstrukční změny bez písemného souhlasu výrobce.
- Při rozkládání rampy dbejte na to, aby nedošlo ke skřípnutí prstů nebo jiných částí těla uživatele.
- Rampu lze používat pouze na stabilním podkladu.



Tento symbol na zařízení nabádá ke zvýšené opatrnosti. Prsty nebo jiné části těla uživatele a/nebo asistenta mohou být skřípnuty mezi jednotlivými částmi zařízení během rozkládání, skládání nebo nastavování zařízení. Zejména buďte opatrní při seřizování parametrů zařízení. Věnujte pozornost mezerám mezi jednotlivými částmi zařízení, aby nedošlo ke skřípnutí prstů nebo jiných částí těla.

4 Rampy Pondus

Dodání & Obecný popis výrobku

Rampy Pondus jsou vyrobeny z hliníkových profilů a jsou odolné vůči korozi. Sada se skládá ze 2 jednotlivých ramp nebo 2 skládacích či teleskopických kolejničových ramp se 2 až 3 díly. Povrch je speciálně rýhovaný a má proto protiskluzové vlastnosti.

Počáteční kontrola

Rampy jsou dodávány v krabicích, ve složeném stavu z důvodu snazší přepravy. Krabice obsahuje:

- 2 rampy
- 1 uživatelskou příručku

Nejprve zařízení vyndejte z krabice a zkontrolujte dle seznamu a níže uvedeného obrázku, zda nic nechybí. Pokud v tuto chvíli zjistíte, že některá část chybí nebo je poškozená, montáž přerušte a kontaktujte prodejce.


5 Rampy Pondus

Instalace & Použití

Pomocí níže uvedeného obrázku lze zařízení velmi instinktivně připravit k použití. Doporučujeme provést následující kroky:


Skládání & Rozkládání

Skládací rampy (1100F2, 1500F2, 2000F2)

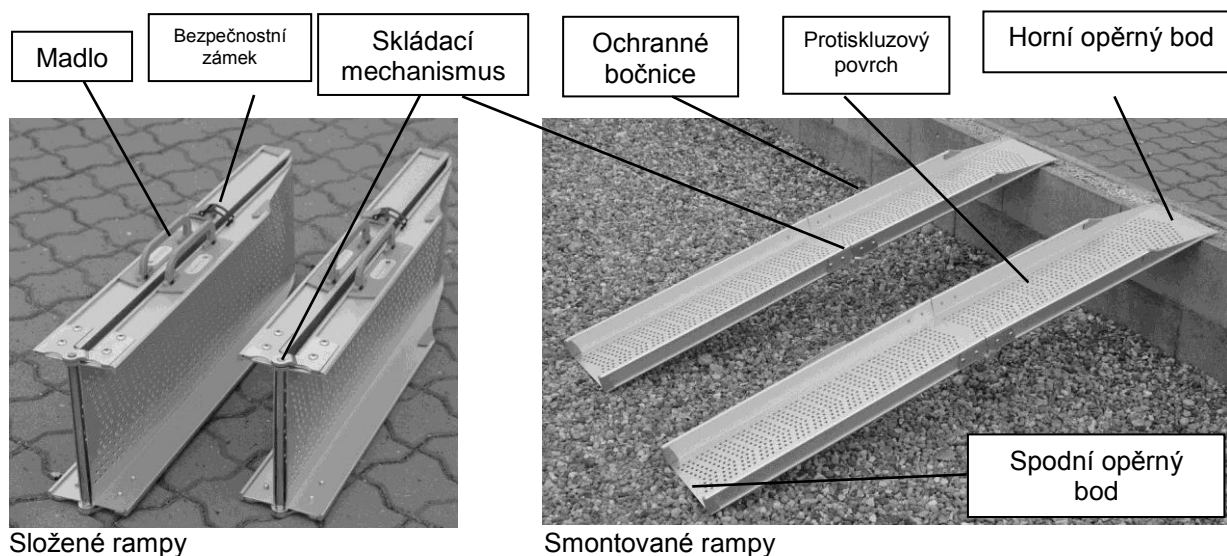


- Pro rozložení rampy odemkněte bezpečnostní zámek umístěný na straně výrobku a vyklopte oba konce rampy do strany. Postup opakujte u druhé rampy.
- Pro složení rampy složte jednotlivé poloviny na sebe a zabezpečte je bezpečnostním zámkem.

Teleskopické rampy (1200T2, 2000T2, 2000T3, 2900T3)

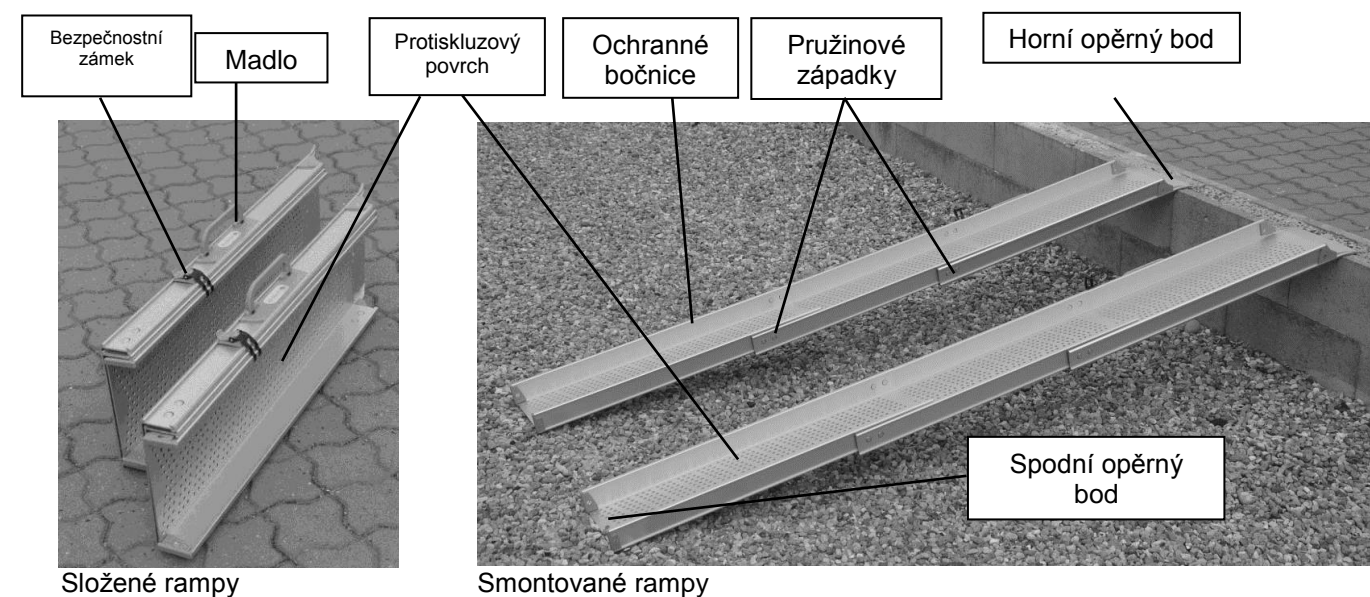

- Pro rozložení rampy odemkněte bezpečnostní zámek umístěný na straně výrobku a roztáhněte oba konce rampy do strany. Postup opakujte u druhé rampy.
- Rampy musí být v otevřené poloze zablokovány pomocí pružinových západek. Bezpečné otevření a uzamčení rampy poznáte podle charakteristického cvaknutí.
- Rampy se skládají ze dvou nebo tří posuvných částí, v závislosti na jejich délce. Ujistěte se, že všechny části jsou bezpečně zablokovány.
- Pro složení rampy zmáčkněte pružinové západky umístěné na ochranných bočnicích a jednotlivé části potlačte k sobě. Zabezpečte rampu bezpečnostním zámkem.

Skládací teleskopická kombinovaná rampa (2770FT3)

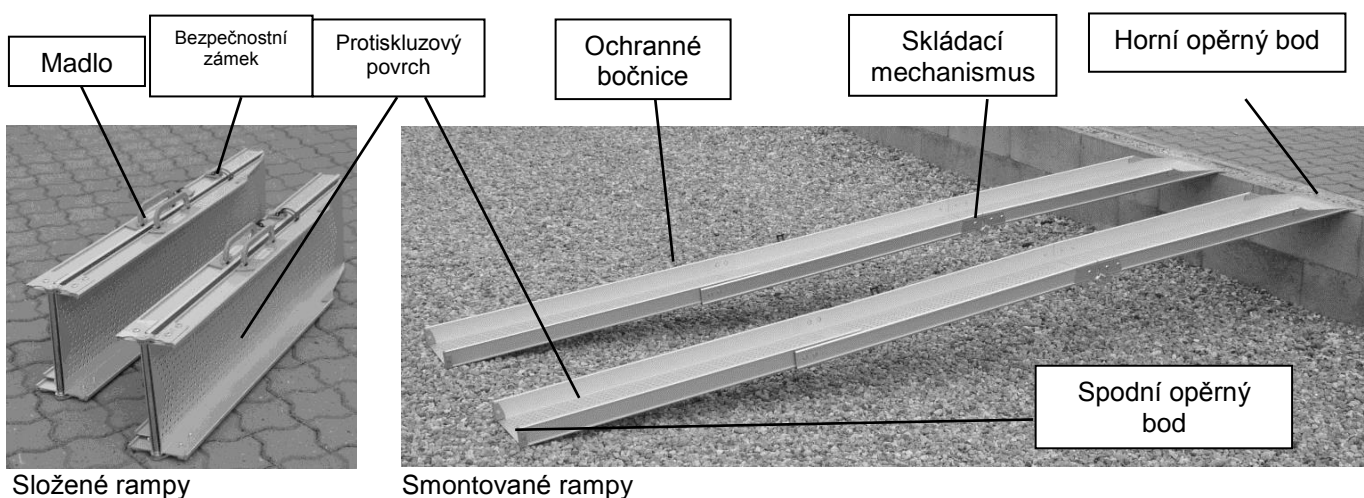

- Jedná se o kombinaci skládací a teleskopické rampy, vybavené oběma mechanismy.
- Pro rozložení rampy odemkněte bezpečnostní zámek umístěný na straně výrobku.
- Pro rozložení skládacího mechanismu vyklepte oba konce rampy do strany. Postup opakujte u druhé rampy.
- Pro rozložení teleskopické části vytáhněte spodní stranu rampy. Postup opakujte u druhé rampy.
- Délku rampy je možné nastavit vysouváním a zasouváním teleskopické části.
- Pro složení rampy zasuňte teleskopické části do sebe, poté sklopte obě poloviny rampy a uzamkněte je bezpečnostním zámkem.

Použití (všechny typy)

- Rampy mají 2 ochranné bočnice proti bočnímu sklouznutí.
- Rampy mají dva opěrné body:
 - Horní opěrný bod musí být vždy umístěn na horní části překážky, kterou je potřeba překonat.
 - Spodní opěrný bod musí být vždy umístěn v nejnižším bodě pod překážkou.
- Rampy musí být umístěny na stabilním podkladě.
- Kolejnice musí být vždy umístěny paralelně vedle sebe.
- Před použitím rampy se ujistěte, že je stabilní.



6 Rampy Pondus Popis přepravy

Rampy lze snadno složit nebo zkrátit (díky zasouvání) a zabezpečit pro přepravu. Během přepravy se vždy ujistěte, že je rampa zabezpečena proti nechtěnému pohybu.

7 Rampy Pondus Technické údaje

Produkt. číslo	Typ	Max. délka (mm)	Šířka tratě (mm)	Max. převýšení (výškový rozdíl) (mm)	Max. zatížení na pár (kg)	Hmotnost (pár) (kg)
PS00550	550S	550	210	110	400	2,9
PS001170	1200S	1170	210	230	400	5,8
PF201100	1100F2	1100	210	220	400	7,1
PF201500	1500F2	1500	210	300	400	9,2
PF202000	2000F2	2000	210	400	300	11,7
PF201190	1200T2	1190	195	240	350	7,3
PT202030	2000T2	2030	195	400	300	11,3
PT301990	2000T3	1990	180	400	300	12,0
PT302890	2900T3	2890	180	580	250	16,2
PFT32770	2800FT3	2770	195	600	250	16,6

8 Rampy Pondus Štítek

Výrobní štítek je umístěn na jedné straně zařízení:

Pondus ramps/Rampen	 REHASENSE Sp. z o.o. Sulejowska 45 97-300 Piotrków Tryb. Poland www.rehasense.com
Type/Typ: 1100 F2 Max. load/Max. Belastung: 200kg/pcs Max. step/Max. Steigung: 22cm Item no./Art.Nr.: PF201100	
SN	CE

9 Rampy Pondus Popis čištění

Obecně:

- Zařízení pravidelně čistěte a udržujte jej v čistotě.
- Lehké znečištění a špínu lze odstranit vlhkým hadříkem.
- Větší nečistoty lze odstranit nekorodujícím šetrným čisticím prostředkem a vodou.
- Nepoužívejte hrubá abraziva nebo čisticí prostředky na bázi bělidla, mohou způsobit poškození.
- Jednotlivé části usušte suchým hadrem.

10 Rampy Pondus Údržba

Rampy jsou v podstatě bezúdržbové. Doporučuje se však před použitím vždy zkontrolovat, zda není protisklizový povrch znečištěný nebo poškozený. V případě jakýchkoli pochybností ohledně technického stavu Vaší rampy ji přestaňte používat a obraťte se na prodejce. Navzdory pevné konstrukci a použití odolných materiálů může dojít k opotřebení výrobku. Doporučujeme proto nechávat výrobek pravidelně zkontrolovat odborníkem.

- Zkontrolujte dotažení všech zámků.
- Okamžitě vyměňte veškeré poškozené nebo opotřebované části.

11 Rampy Pondus

Jak zařízení zlikvidovat

Zařízení by se nemělo likvidovat společně s běžným odpadem. Mělo by být předáno do sběrného dvora k recyklaci.

12 Rampy Pondus

Záruka

Prodejce poskytuje záruku 2 roky na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené jiným použitím, než jaké určuje výrobce nebo nedodržením pokynů v této příručce.

V případě jakýchkoli technických problémů se obraťte na prodejce.

Váš prodejce:

PRODEJCE:

MEYRA ČR s.r.o.

Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4
Česká republika

Tel. prodej: +420 272 761 102

Tel. servis: +420 272 661 430

www.meyra.cz

VÝROBCE:

Rehasense® Europe
Sulejowska 45
97-300 Piotrków Trybunalski
Polsko