

NÁVOD – CHODÍTKA MOPEDIA

Zdravotnické prostředky třídy I podle směrnice 93/42 / EHS a následné změny

1. Kódy

RP675 Dvoukolový ocelový chodítko POSEIDON

RP680 Dvoukolové ocelové chodítko se sedátkem ZEUS

RP685B Tříkolové chodítko CRYO

RP690B Čtyřkolové ocelové chodítko - modrá barva DYONE

RP690R Čtyřkolové ocelové chodítko - červená barva DYONE

RP691 Čtyřkolové ocelové chodítko s předloketními opěrkami ERA

2. Úvod

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili chodítko MOPEDIE MORETTI S.p.A., které Vám pomůže s pohybovými obtížemi v každodenním životě. Výroba byla provedena podle nejvyšší kvality a bezpečnostních norem v souladu s evropskou směrnicí o zdravotnických prostředcích (93/42 / EEC).

Tento návod k obsluze poskytuje návod na správné používání a bezpečnost. Doporučujeme si pečlivě přečíst tento návod k použití před použitím. V případě pochybností kontaktujte svého prodejce.

Poznámka:

Zkontrolujte všechny součásti a ověřte, zda nedošlo k poškození při přepravě.

V případě poškození při přepravě nepoužívejte. Další pokyny obraťte na prodejce.

3. Určené použití

Toto chodítko je vhodné pro osoby s problémy s pohybem. Může být použit jako pomocný prostředek k usnadnění pohybu. Každopádně ji nemohou používat lidé se zjevnou poruchou ruky či rameny, a to i u lidí s problémy s rovnováhou. Chodítko lze použít uvnitř i venku.

Doporučujeme používat na rovném povrchu, kde kola dosáhnou země. Nesmí být používán na hrbolatém povrchu ani na šikmé ploše, protože chodítko může být nestabilní. Zařízení není určeno k přenášení lidí nebo věcí.

VAROVÁNÍ!

Nepoužívejte výrobek pro účely, které nejsou uvedeny v této příručce. Výrobce odmítá veškeré odpovědnosti za jakékoli důsledky vyplývající z nesprávného použití tohoto výrobku a neoprávněné změny na rámu výrobku. Výrobce může změnit zařízení nebo návod k použití bez předchozího upozornění.

4. Prohlášení o shodě

Společnost Moretti S.p.A prohlašuje na základě výlučné odpovědnosti, že výrobek vyráběný a obchodovaný společností Moretti S.p.A. a patřící do skupiny „chodítko“ je v souladu s evropskou směrnicí o zdravotnických prostředcích (93/42 / EEC). Společnost Moretti S.p.A zaručuje a prohlašuje na vlastní odpovědnost následující:

1. Zařízení, která jsou předmětem diskuse, splňují základní požadavky požadované směrnicí 93/42 / EHS o uzavření, jak je stanoveno v příloze VII uvedené směrnice.

2. Zařízení NEJSOU měřicí přístroje.

3. Přístroje, o nichž se diskutuje, nejsou vyráběny pro klinické testy.

4. Zařízení, které jsou předmětem diskuse, jsou obchodovány v NESTERILNÍM BALENÍ.
5. Diskutovaná zařízení patří do třídy I °.
6. NENÍ POVOLENO k používání a instalaci zařízení, s výjimkou použití společnosti Moretti S.p.A. Moretti S.p.A. ukládá technickou dokumentaci příslušným orgánům, aby dokázala souladu zařízení 92/42 / EHS.
7. Moretti S.p.A vede a poskytuje orgánům technickou dokumentaci prokazující splnění evropské směrnice o zdravotnických prostředcích (93/42 / EEC).

5. Varování

5.1 Všeobecné varování

- NIKDY neinstalujte ani nepoužívejte přístroj dříve, než si přečtete a porozumíte této příručce. Pokud se vám nedaří porozumět varování, upozornění nebo pokyny, obraťte se na prodejce zdravotnického personálu nebo na technický personál, než se pokusíte nainstalovat toto zařízení, abyste se vyhnuli zranění nebo poškození;
- Chodítka by mělo být používáno pouze pacienty s vhodnou motorickou kapacitou, která zajistí jejich bezpečné použití;
- Informujte lékaře nebo terapeuta o správném nastavení a správném použití;
- Lékař nebo terapeut by měl přispívat k nastavení výšky maximální podpory, správné aktivaci brzdy a obecné sestavy;
- Chodítka nejsou určena k použití jako samohybné zařízení.

5.2 Upozornění pro použití

- Zajistěte, aby byl kabel brzdy správně nastaven;
- Ověřte správnou funkci brzdy po každém nastavení výšky, abyste zabránili volnému ohnutí kabelu;
- Přerušení těchto jednoduchých pravidel může způsobit osobní škody;
- Chodítka lze používat pouze na tvrdém a rovném povrchu. Nepoužívejte pro vystupování po schodech;
- Udržujte rovnováhu vždy na obou rukojetích;
- Věnujte zvláštní pozornost vlhkému, ledovému nebo zasněženému povrchu;
- Nepřetěžujte zařízení;
- Nepoužívejte sedačku (pokud je k dispozici) pro přepravu osob nebo majetku, sedadlo je pro uživatele s aktivovanou parkovací brzdou;
- Všechna kola musí být během používání kdykoli v kontaktu s podlahou, aby se zajistilo správné vyvážení chodítka a maximální bezpečnost;
- Před použitím sedadla musí být brzda zapnutá.

Poznámka:

Pokud je chodítka používáno ve stabilní poloze, musí být ruční brzda zablokována.

5.3 Upozornění na stabilitu

- Chodítka může poskytnout pomoc osobě s hmotností do 136 kg, VČETNĚ nákladového vaku;
- Vak má omezení hmotnosti 5 kg.

5.4 Montáž a skládání varování

- Ověřte, zda jsou obě podpěrné trubky rukojeti správně zasunuty do rámu a zajištěny pomocí zajišťovacích koleček zablokových do držáku pomocí hlavních křídlových matic a knoflíků bez pohybu;

- Obě rukojeti jsou bezpečně zajištěny v hlavní opěrné části s křídlovými maticemi a knoflíky bez jakýchkoliv pohybů;
- Na rám nic nevěste, aby nedošlo k deformaci trubek a poškození stability.
- Při otevírání a zavírání dávejte pozor na zachycení prstů a / nebo oděvu.

6. Před použitím

Před použitím zařízení vždy zkontrolujte:

1. Všechny části zařízení jsou bezpečně zajištěny;
2. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby utažené;
3. Ujistěte se, že sedadlo je řádně uzamčeno (pokud ještě netisknete dolní rám sedadla);
4. Zkontrolujte, zda je sedadlo správně zasunuto;
5. Zkontrolujte správnou funkci brzdy.

7. Pokyny před montáží

Rozbalte produkt a zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k žádnému poškození. V případě, že je chodítko poškozeno, kontaktujte prodejce.

8. Montáž

8.1 Otevření chodítka

RP675-RP680-RP690B / R-RP691

Otevřete chodítko vytažením přední části rámu pomocí páky na nohách.

RP685B-RP687

Rozevřete rám chodítka a zatlačte výztužnou tyč do přední části dolů.

Umístěte rukojeti do rámu. Otočte zajišťovací knoflíky, dokud nejsou zajištěny. Šestihranný otvor je potřebný pro uložení hlavy šroubu.

8.2 Složení chodítka

RP675-RP680-RP690B / R-RP691

Nastavte páku na postranních tyčích a přejeďte zpět na přední stranu chodítka.

RP685B-RP687

Vyjměte táč, koš, tašku, vytáhněte páčku vyztuženou dovnitř a sklopte chodítko.

8.3 Nastavení rukojetí

Nastavte výšku rukojetí pomocí bočních knoflíků. Odšroubujte knoflík, umístěte rukojeti do požadované výšky, otáčejte knoflíkem ve směru hodinových ručiček a opět jej utáhněte.

Zopakujte druhou rukojeť a ujistěte se, že obě rukojeti jsou umístěny ve stejné výšce.

VAROVÁNÍ!

Ujistěte se, že rukojeť je v souladu se směrem pohybu chodítka. Pokud rukojeť nezůstane rovná, hrozí nebezpečí, že se chodítko převrhne, zvláště pokud na něj silněji zatlačíte.

8.4 Táč (pouze pro modely RP685B a RP690B / R)

Táč slouží pouze k odkládání malých předmětů.

VAROVÁNÍ!

Nepokládejte horké, ostré nebo těžké předměty na táč.

Chcete-li připevnit táč k rámu, vložte nosič, který se nachází na zadní straně tácu, do odpovídajících otvorů na sedadle.

8.5 Košík (pro RP685B - RP690B / R - RP691)

Nákupní košík je zavěšen dvěma háky na rámu chodítka.

VAROVÁNÍ!

Používejte koš pouze pro drobné předměty. Nepřepíňujte košík, aby nedošlo k nerovnováze a riziku převrácení.

8.6 Taška (pouze pro model RP685B)

Taška je upevněna k rámu chodítka přes svorky.

VAROVÁNÍ!

Maximální kapacita tašky je 5 kg. Používejte tašku pouze pro malé předměty. Nepřepíňujte tašku, aby nedošlo k nerovnováze a nebezpečí převrácení.

8.7 Sedadlo (pouze pro model RP680-RP687-RP690B / RP691)

Před usednutím umístěte chodítko na rovnou a pevnou plochu a pak zajistěte brzdy.

Ujistěte se, zda jsou brzdy pevně zajištěny a zda je chodítko ve stabilní poloze.

VAROVÁNÍ!

Sedněte si tak, abyste rozložili váhu na sedadlo. Nesedějte posunutím pouze na jednu stranu.

8.8 Brzdy

Brždění

Chcete-li zabrzdit vozík, zatáhněte brzdovou páčkou prsty směrem nahoru, až se chodítko zpomalí nebo zastaví. Chcete-li pokračovat v posunování chodítka, uvolněte rukojeti brzdy.

Uzamčení kola

Stiskněte brzdovou páčku dolů dlaní, když uslyšíte, že jsou kolečka "kliknutím" zablokována.

VAROVÁNÍ!

Pokud je uživatel v klidu, brzdy musí být zablokovány.

Odemknutí koleček

Vytáhněte obě brzdové páky, dokud nejsou odemčeny.

9. Jak používat

- Začněte tlačit, když jste ve vzpřímené poloze oběma rukama na rukojeti;
- Ujistěte se, že jsou vaše ruce suché před použitím chodítka, abyste zabránili nebezpečí uklouznutí;
- Při chůzi udržujte vzpřímenou pozici s očima směřujícím dopředu a ne dolů;
- Nedržte chodítko příliš daleko od těla, což může způsobit nebezpečné pády a přetížení;
- Nepoužívejte chodítko k překonání překážek vyšších než 20 mm;
- Při použití venku dávejte přednost chodníkům, které jsou řádně připraveny podle předpisů pro odstranění architektonických bariér.

10. Péče a údržba

MOPEDY společnosti Moretti SpA na trhu jsou pečlivě zkontrolovány a nesou značku CE. Pro bezpečnost pacienta a lékaře doporučujeme, aby výrobcem schválené laboratoře, nejméně jednou za dva roky, zkontrolovaly vhodnost použití zařízení. Při opravách je třeba použít pouze originální náhradní díly a příslušenství.

Doba životnosti výrobku závisí na použití, údržbě, skladování a čištění.

11. Čištění

Při čištění dílů používejte pouze vlhkou utěrku s neutrálním čisticím prostředkem,

nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla a kovové kartáče nebo abrazivní nebo ostré předměty, mohlo by dojít k poškození výrobku.

12. Péče o kolečka

1. Očistěte kolečka teplou vodou a jemným mycím prostředkem. Osušte je čistým hadříkem.
2. Pravidelně kolečka mažte.

13. Záruka

Výrobky společnosti Moretti mají záruku na materiálu nebo výrobních vady 2 roky od data nákupu, s výjimkou možného vyloučení nebo omezení následujícím způsobem. Záruka se nevztahuje v případě škody způsobené nesprávným použitím, zneužitím nebo změnami a záruka nebude platná, pokud pokyny k použití nejsou přísně dodržovány. Správné zamýšlené použití je uvedeno v této příručce.

Výrobce není zodpovědný za následné škody, zranění nebo jakékoliv jiné následky způsobené nebo v souvislosti s nesprávnou instalací nebo nesprávným používáním zařízení. Výrobce nezaručuje škody způsobené následujícími podmínkami: přírodní katastrofa, neoprávněná údržba nebo opravy, závady způsobené problémy s dodávkou elektřiny (potřebné), používání náhradních dílů, které nejsou pokryty výrobcem, nesprávné použití, neoprávněné změny, škody způsobené přepravou (odlišné od původních zásilek společnosti výrobce) nebo v případě nedostatečné údržby, jak je uvedeno v příručce. Záruka se nevztahuje na součásti, které jsou vystaveny opotřebení při správném používání zařízení.

13.1 Oprava

Záruční oprava:

Pokud zařízení během záruční doby představuje chyby materiálu nebo výrobní chyby, výrobce se dohodne s zákazníkem, zda může být porucha kryta ze záruky.

Výrobce může opravit nebo vyměnit předmět, prostřednictvím prodejce nebo samostatně.

Oprava nebo výměna nezahrnuje záruku.

Opravy po záruční době:

Výrobek bez záruky může být vrácen zpět výrobcí k opravě. Náklady za práci a přepravu po záruce platí odběratel nebo prodejce. Opravy jsou zaručeny po dobu 6 měsíců od přijetí.

Zařízení bez vad:

Zákazník bude informován o tom, zda se zařízení vrátí a výrobce prohlašuje, že zařízení není vadné. V takovém případě bude zboží vráceno zákazníkovi, poplatek za přepravu bude placen zákazníkem.

13.2 Náhradní díly

Původní náhradní díly výrobcem jsou garantovány po dobu 6 měsíců ode dne přijetí.

13.3 Ustanovení o výjimce

Výrobce nenabízí žádné další prohlášení, záruku ani podmínky, výslovné ani implicitní, včetně případných prohlášení, záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, neporušení, a to vše, co je výslovně uvedeno v této záruce. Výrobce nezaručuje nepřetržité a bezchybné použití. Doba trvání možných implicitních záruk, které mohou být stanoveny podle zákona, je omezena záruční dobou v mezích zákona. Některé státy nebo země neumožňují omezit implicitní záruku nebo vyloučení nebo omezení neúmyslných škod. V takových zemích se některé z těchto vyloučení nebo omezení nemusí vztahovat na uživatele. Tato záruka může být změněna bez předchozího upozornění.