

# NÁVOD K POUŽITÍ

## INVALIDNÍ VOZÍK MECHANICKÝ CP205

### POUŽITÍ

Mechanický vozík je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby, osoby se sníženou schopností mobility, postižením dolních končetin nebo s různým stupněm ochrnutí. Vozík slouží pro přepravu osob v interiéru i exteriéru.



### POPIS

Rám vozíku je vyroben z povrchově upravených duralových trubek a profilů vysoké pevnosti, což zaručuje jeho výborné užitkové vlastnosti a pevnost i v nejnáročnějších provozních podmínkách. Vozík je vybaven skládací opěrkou zad, odnímatelnými plnými postranicemi s polstrovanými područkami a odnímatelnými podnožkami s výškově nastavitelnými stupačkami. Pohyb vozíku zajišťují plná 12" zadní kola a přední plná 6" kola, která jsou uložena v otočných vidlicích. Pro zajištění stability v klidové poloze je vozík vybaven ručními parkovacími brzdami zadních kol po obou stranách vozíku a brzdami pro doprovod. Veškeré čalounění vozíku (sedačka, zádová opěrka, područky) je lehce omyvatelné, které svými vlastnostmi umožňují dlouhodobé používání vozíku.

### BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním vozíku si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním vozíku konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Při transportu (automobilem nebo autobusem) nepoužívejte vozík k sezení.

Vozík nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost 150 kg.

Při skládání a rozkládání vozíku postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Je-li vozík v klidu, vždy zaaretujte brzdy.

Stupačka vozíku je určena pro oporu dolních končetin, nikdy na ní nestoupejte a nepřenášejte váhu celého těla.

Neprojíždějte s vozíkem měkký terén (tráva, písek, bahno...).

Vozík nepoužívejte na kluzkém, kopcovitém nebo velmi hladkém povrchu.

Nezdolávejte s ním příliš vysoké překážky a strmě nakloněné roviny.

Vždy přizpůsobte styl i rychlost jízdy terénu a okolním podmínkám.


### **OBSAH BALENÍ**

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části vozíku, tj. vozík s předními i zadními koly a podnožky se stupačkami.

### **ROZLOŽENÍ A SLOŽENÍ VOZÍKU**

#### **Postup při rozkládání vozíku:**

1. Vozík naklopte směrem k sobě.
2. Volnou rukou stlačte trubku sedačky dolů a vozík částečně rozložte.
3. Vozík postavte zpět na všechna čtyři kola.
4. Stlačte obě trubky sedačky směrem dolů, až do úplného rozložení vozíku (obr. 1).
5. Nasadte podnožky (postup viz níž - „Podnožky a stupačky“).
6. Po usazení na vozíku sklopte stupačky.

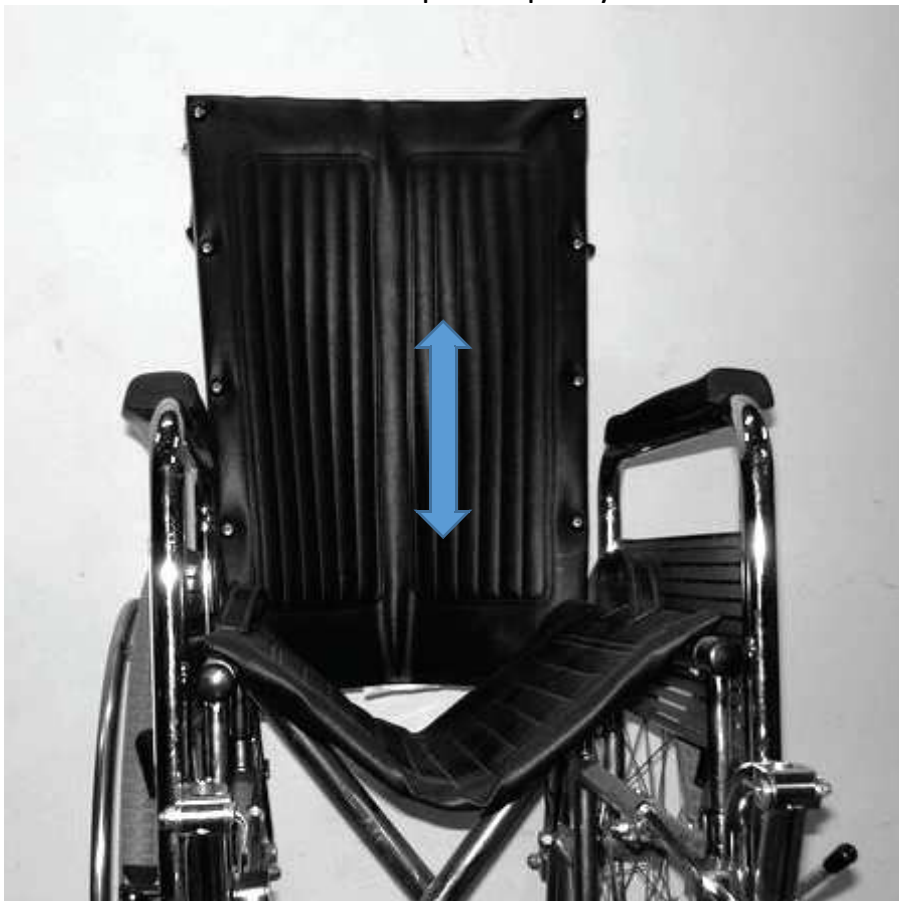

#### **Postup při skládání vozíku:**

1. Odklopte stupačky, popřípadě odejměte kompletní podnožky (postup viz níže - „Podnožky a stupačky“).
2. Vytáhněte sedačku za ucha po stranách nahoru, až do úplného složení



## **PODNOŽKY A STUPAČKY**

### **Postup při odejmutí podnožky:**

1. Uvolněte tahem směrem dovnitř vozíku páčku aretační pojistky na podnožce (obr. 3).
2. Po následném uvolnění vykleňte podnožku do strany (obr. 4).
3. Vysuňte podnožku směrem nahoru (obr. 4).

### **Výškové nastavení stupačky:**

1. Povolte jistící šroub držáku stupačky (obr. 5).
2. Vysunutím nebo zasunutím vnitřní trubky držáku stupačky nastavte požadovanou polohu (obr. 6).
3. Správnou výšku stupaček zjistíte tak, že trup by měl se stehny svírat úhel 90°.
4. Po nastavení nově zvolené polohy šroub opět utáhněte (obr. 5).

## **POSTRANICE**

### **Postup při vysunutí postranice:**

1. Stlačte aretační pojistku na předním úchytu postranice (obr. 7).



2. Uchopením područky vysuňte postranici směrem vzhůru (obr. 8).

## **OPĚRKA ZAD**

### **Postup při sklopení opěrky zad:**

1. Na obou stranách zádové opěrky stlačte na trubce páčku aretační pojistky (obr. 9).



2. Pomocí rukojetí sklopte opěрку zad směrem dozadu (obr. 10).



## **BRZDY**

### **Aktivace brzdy:**

1. Uvedte vozík do klidové polohy.
2. Páku brzdy stlačte směrem od sebe (obr. 11, obr. 12).



## **KOLA**

### **Postup při dotažení zadního kola:**

1. Povolte matici A uvnitř rámu (obr. 14).
2. Sejměte plastovou krytku hlavy šroubu osy kola B a dotáhněte ji (obr. 14).
3. Vraťte plastovou krytku na hlavu šroubu a zkontrolujte, zda v ložisku není vůle (obr. 15).
4. Utáhněte vnitřní matici.

## **KŘÍŽOVÁ VZPĚRA RÁMU**

Centrální šroub křížové vzpěry musí být nastaven tak, aby byl zachován volný pohyb obou částí vzpěry, což zaručuje plynulé a snadné skládání a rozkládání vozíku. Nikdy nezkracujte délku středního šroubu vkládáním vymezovacích podložek!

## **ÚDRŽBA**

Čalounění vozíku je možné čistit běžnými čistícími a dezinfekčními prostředky, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Čistěte vždy celou plochu, kterou po odstranění nečistot důkladně opláchněte čistou vodou. Všechny kovové díly udržujte suché a čisté. Doporučujeme občas přeleštit vhodným leštícím prostředkem.

Pravidelně kontrolujte všechny zajišťovací prvky (brzd, postranic, stupaček, kol), abyste se ujistili, že jsou v bezpečném a provozuschopném stavu. Občasné lehké promazání (sprej WD-40) pohyblivých částí zaručí bezchybný a bezhlučný provoz. Pravidelně kontrolujte stav pneumatik, tlak v pneumatikách je třeba přizpůsobit hmotnosti uživatele. V případě důkladnější kontroly technického stavu nebo

opravy, kontaktujte prosím naše servisní oddělení. Vozík skladujte v suchém a čistém prostředí, chraňte před prachem, vlhkostí a chemickými vlivy.

### **SERVIS A OPRAVY**

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

### **ZÁRUKA**

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním.

Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností AKTIV Zdravotnické potřeby s.r.o. nebo prodávajícím.

### **UPOZORNĚNÍ**

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma AKTIV Zdravotnické potřeby s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.

AKTIV Zdravotnické potřeby s.r.o.

Pamětice 17

CZ - 397 01 Drhovle u Písku

IČ: 01495330

DIČ: CZ01495330

tel. +420 608 100 717

mail: [info@aktivpisek.cz](mailto:info@aktivpisek.cz)

[www.aktivpisek.cz](http://www.aktivpisek.cz)

