

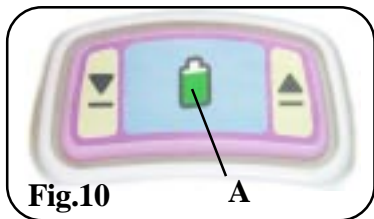
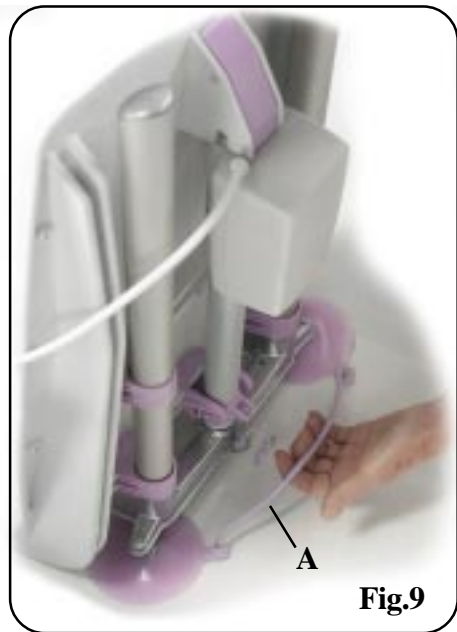
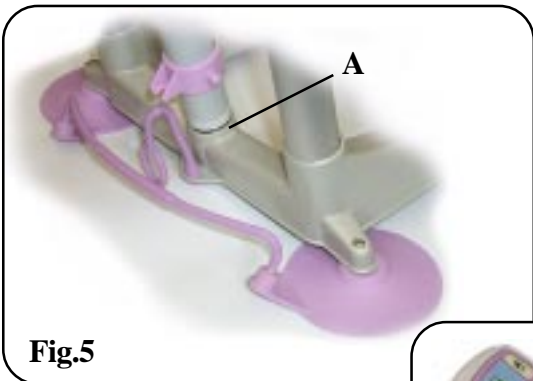
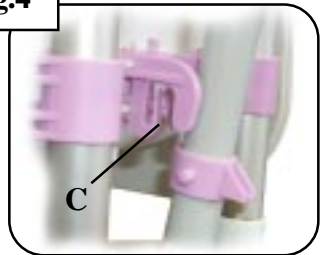
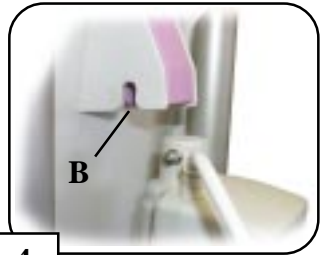
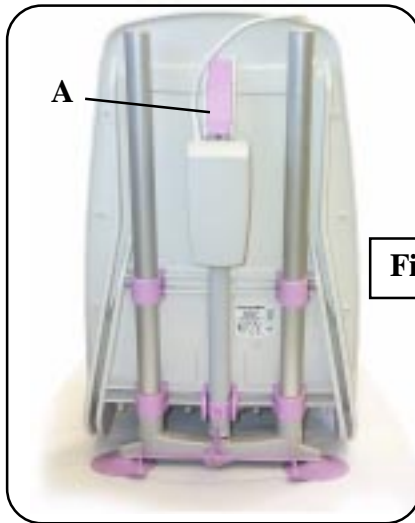


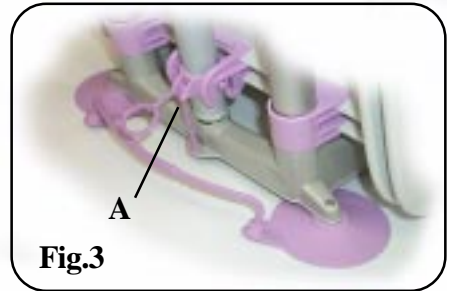

Návod k použití

Archimedes

bathlift

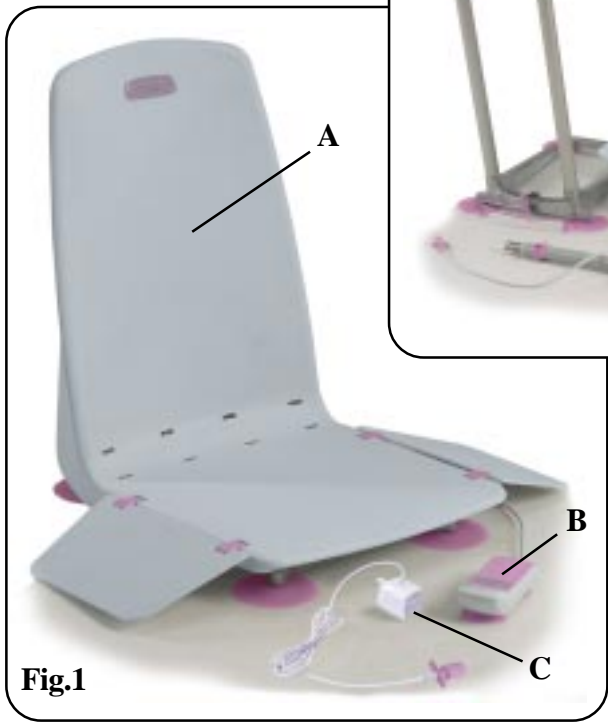

Cz-1 Návod k použití

Model Archimedes společnosti Mangar je velmi lehký, bateriemi napájený a spouštěčem ovládaný zvedací systém pro vany, určený pro snadné ovládání. Archimedes vám zajistí mnoho let bezproblémového koupání, přičemž vyžaduje jen běžné čištění a dobíjení baterií.

Standardní sestava (obr.1)

- 1 x Archimedes zvedací zařízení (včetně dvou podložek pro přenášení) (A).
- 1 x utěsněné manuální ovládání (obsahuje dobíjecí baterii) (B).
- 1 x dobíječ baterií (C).

UPOZORNĚNÍ

- Důkladně si přečtěte tyto pokyny a pochopte je ještě předtím, než se pokusíte provozovat zařízení Archimedes.
- Archimedes může být používán jen jako pomůcka při koupání – nikdy jej nepoužívejte mimo vanu.
- Před použitím se přesvědčete, zda přísavky dobře drží.
- Židle Archimedes je konstruována tak, aby šla ve vaně co nejnižší. Není vhodná do van se zvláště úzkými nebo zakřivenými stranami/dny. Vždy zkontrolujte, zda židlová část volně klesá v plném rozsahu a pak volně stoupá. Před použitím ověřte, zda je židle správně umístěna.
- Zabraňte tomu, aby Archimedes ležel na zadní straně ve vodě pro koupání.
- Zajistěte, aby byly podložky pro přenášení prosty jakýchkoli překážek, jako jsou například madla ve vaně, držáky mýdla a aby byla sedací část zvednuta. **POZNÁMKA:** Aby se podložky nezachytily pod madla, jsou k dispozici ochranné prvky podložek ve formě volitelného příslušenství.
- Baterii dobíjete pouze pomocí dobíječky Mangar, dodávané společně se zařízením Archimedes.
- NIKDY nedobíjete baterii v koupelně, venku nebo ve vlhkém prostředí.
- Zařízení nepoužívejte tam, kde se nacházejí hořlavé směsi anestetik se vzduchem, kyslíkem nebo oxidem dusíku.
- Nespouštějte spínač, pokud je odpojen od základny.
- Nepoužívejte zařízení Archimedes jako oporu při čištění vany nebo pokud se potřebujete dostat do vany, abyste z něho vyndali.

Začínáme

Vybalení – Vyjměte obsah balení a zkontrolujte, zda v průběhu přepravy nedošlo k nějakému poškození. Pokud zjistíte jakékoli poškození, okamžitě kontaktujte dodavatele.

Baterie – Před prvním použitím zařízení Archimedes ji musíte dobít následujícím způsobem:

- Připojte manuální ovladač k dobíjecí baterii a dobíječ připojte do zásuvky MIMO KOUPELNU – nechejte dobíjet přes noc (viz “Dobíjení baterií”).

Sedátko a základna – Zařízení Archimedes lze snadno rozdělit na tři části (obr.2).

Pro oddělení sedátka od základny a spouštěče:

- Zcela spusťte sedátko a sklopte podložky pro přenášení na sedátko.





- Uvolněte přepravní upevnění (A obr.3) tahem za ‘O’ kroužek směrem nahoru a vyzvednutím kuličky ze slotu na límci kolem těla spouštěče.
- Stiskněte spodní část západky na zadní straně sedátka (A obr. 4) a současně sedátko dostatečně zvedněte tak, aby se spouštěč mohl odpojit ze slotu v západce (B obr.4) a z úchyty pro umístění spouštěče (C obr.4). Nyní lze spouštěč odstranit od základny.
- Zvedněte sedací část ze základny.
- Zpětnou montáž proveďte opačným postupem. Pokud nechcete zařízení Archimedes převážet, neupevňujte znovu přepravní pásek.

Přepravní pásek stačí připevnit k zadní straně sedací části tak, aby spojoval sedátko a základnu při přenášení zařízení Archimedes.

Umístění zařízení Archimedes do vany

- Před umístěním zařízení Archimedes do vany zkontrolujte povrch, na který se budou přisávat přísavky – zda je čistý a není pokryt zbytky koupacího oleje nebo čistícího prostředku, odstraňte podložku proti uklouznutí. **UPOZORNĚNÍ:** přísavky se nemusí dostatečně přichytit na zdrsňené a protiskluzové části vany.
- Odstraňte spouštěč a sedací část ze základny (viz kapitola “Začínáme”). Navlhčete jednotlivé přísavky a umístěte základnu co nejbližší k zádům vany. Spouštěč umístěte do zásuvky v zadní části základny.
- Sklopte podložky pro přenášení na sedátko a zasuňte sedátko do základny. Umístěte horní část spouštěče do slotu v západce (B obr. 4) na zadní straně sedací části a ujistěte se, zda ‘zacvakl’ na své místo.
- Zastrčte ruční ovládání do vedení spouštěče (obr.6&7).

Používání zařízení Archimedes

- Stiskněte tlačítko  na ručním ovladači pro zvedání sedátka.
- Uvolněte tlačítko  poté, co sedátko dosáhne úrovně okraje vany. **POZNÁMKA:** Ujistěte se, zda je podložka pro přenášení v rovině okraje vany a zda je o něj opřená (obr.8) a teprve poté přejděte k přesunu osoby.
- Posaďte se na podložku pro přenášení a přesuňte se na sedátko.
- Pro spuštění dolů stiskněte tlačítko . Pokud tlačítko v kterémkoli bodě uvolníte, spuštění se zastaví.
- Pro zvedání sedátka stiskněte tlačítko . Poté, co podložka pro přenášení dosáhne úrovně okraje vany a opře se o něj, tlačítko uvolněte.

UPOZORNĚNÍ: V případě nebezpečí lze posun sedátka kdykoli zastavit odpojením ručního ovladače tak, že jej vytáhnete z vedení spouštěče (obr.6).



Vyjímání zařízení Archimedes z vany

- Zcela spusťte sedátko.
- Sklopte podložky pro přenos na sedátko.
- Stiskněte západku na zadní straně sedátka (A obr.4) a zvedněte sedátko ze základny.
- Vytáhněte spouštěč.
- Zvedněte páčku pro uvolnění přísavek na zadní straně základny (A obr.9) a sklopte základnu dopředu.
- Pokračujte ve sklápění základny kupředu. Tím se automaticky uvolní přísavky v přední části a následně bude možné vyndat základnu z vany. **POZNÁMKA:** nepoužívejte páčku pro uvolnění přísavek (A obr.9) pro sklápění nebo zvedání základny. NIKDY se nepokoušejte uvolnit připevnění zadních přísavek tahem za vodící lišty.

Manuální ovládání

Ruční ovladač je dokonale utěsněn a obsahuje dobíjecí baterii a světelný indikátor stavu baterie.

Indikátor stavu baterie

Pokud stisknete tlačítko  nebo , světelný indikátor (A obr.10) poskytne informaci o stavu baterie dle následujícího:

ZELENÁ – připraven na použití.

BLIKAJÍCÍ ZELENÁ - připraven na použití, ale baterii bude po této koupeli třeba dobít.

ČERVENÁ – Baterii je třeba dobít ještě před použitím zařízení. Sedátko se nespustí dolů. **POZNÁMKA:** Mikroprocesor v ručním ovladači nepovolí spuštění sedátka, pokud zjistí, že by baterie nestačila na jeho následné zvednutí.

Baterie není vyměnitelná. Poté, co dosáhne konce životnosti, což se projeví nemožností dalšího dobítí (často zůstává na indikátoru stavu baterie červená), bude třeba celý ruční ovladač vyměnit za nový. Je třeba vrátit starý ovladač vašemu dodavateli nebo společnosti Mangar International pro bezpečnou likvidaci. **NEHÁZEJTE** manuální ovladač do běžných odpadků.

Dobíjení baterie

- Odpojte manuální ovladač od spouštěče (obr.6).
- Připojte manuální ovladač na dobíječ baterie (obr.11).
- Dobíječ baterií připojte do zásuvky mimo koupelnu a zapněte. Na dobíječi se rozsvítí jantarový indikátor, což znamená, že je dobíječka správně připojena k manuálnímu ovladači.

Pokud potřebuje baterie dobít, manuální ovladač je třeba nechat dobíjet přes noc. Manuální ovladač můžete nechat dobíjet neustále, aniž by došlo k poškození baterie nebo dobíječky. **Doporučujeme nechat manuální ovladač v nabíječce neustále po dobu, kdy nepoužíváte zařízení Archimedes – mělo by se jednat o rutinní postup.**

Čištění

Zařízení Archimedes pravidelně čistěte stejným neabrazivním prostředkem, jaký používáte pro čištění vany. Před čištěním je vhodné oddělit sedátko od základny. Archimedes může být dezinfikován odpovídajícím sterilizačním roztokem, jako je třeba 'Milton' či jiný antibakteriální čistič.

Pravidelným čištěním dosáhnete prodloužení životnosti a účinnosti zvedacího zařízení pro vany Archimedes.

Skladování

Zařízení Archimedes je třeba skladovat se zcela spuštěným sedátkem a s odpojeným manuálním ovladačem. Při dlouhodobém skladování zajistěte, aby byl Archimedes dokonale vysušen a aby byl skladován v suchém prostředí.

Přepravní upevňovací pásek (A obr.3) je třeba připojit k sedací části tak, aby bylo možné zařízení Archimedes snadno zvednout a přenášet.

Údržba

Archimedes byl navržen tak, že kromě běžného čištění nevyžaduje žádnou údržbu. Doporučujeme však každoroční prohlídku zařízení Archimedes u vašeho dodavatele nebo jiné náležitě kvalifikované osoby. Pro další rady se obraťte na svého dodavatele nebo na Mangar International.

Archimedes neobsahuje žádné části, které by mohl uživatel opravovat. Opravy či servis musí vždy provádět váš dodavatel nebo jiná oprávněná osoba.

Zjištění závady

Pokud se sedátko nezvedá:

- Zkontrolujte, zda je manuální ovladač ZCELA zasunut do zásuvky ve spouštěči (obr.6).

Pokud se sedátko nespouští:

- Zkontrolujte, zda indikátor stavu baterie nesvítí ČERVENĚ. Pokud ano, je třeba nechat ruční ovladač přes noc nabíjet.
- Zkontrolujte, zda je manuální ovladač ZCELA zasunut do zásuvky ve spouštěči (obr.6).

Specifikace

Archimedes

Max. hmotnost uživatele:	150kg (330liber)
Celková hmotnost:	10kg
Sedací část samostatně:	5,2kg
Základna samostatně:	2,8kg
Spouštěč:	2kg
Výška sedátka (Min/Max):	8cm/45cm
Příkon spouštěče:	12V: 7,5A
Třída ochrany:	IP66

Manuální ovladač (baterie)

Typ:	NiCad
Výstup:	12V: 7,5A
Vnitřní ochrana:	samoresetovací pojistka
Třída ochrany:	IP67


Dobíječ baterie

AC vstup:	230V: 1,22VA: 50-60Hz
DC výstup:	17.4V: 70mA
Vnitřní ochrana:	samoresetovací tepelné odpojení
Třída ochrany:	IP50
Zařízení třídy II s dvojitou izolací	

Tento výrobek může být převážen v letadle.

Seznam dílů

1	Komplet sedátka	LA0010	8	Převodní pásek	LA0017
2	Podložka	LA0011	9	Manuální ovladač	LA0018
3	Závěs (sada 2 kusů)	LA0012	10	Dobíječ baterií	LA0019
4	Komplet základny	LA0013	11	Elektrický adaptér pro Evropu	LA0020
5	Přísavka (sada 4 kusů)	LA0014	12	Vodící lišty podložek (pár)	LA0021
6	Komplet spouštěče	LA0015	13	Instrukční příručka	MI0173
7	Úchyt spouštěče	LA0016	14	Hand Control Keeper (with instructions)	LA3706

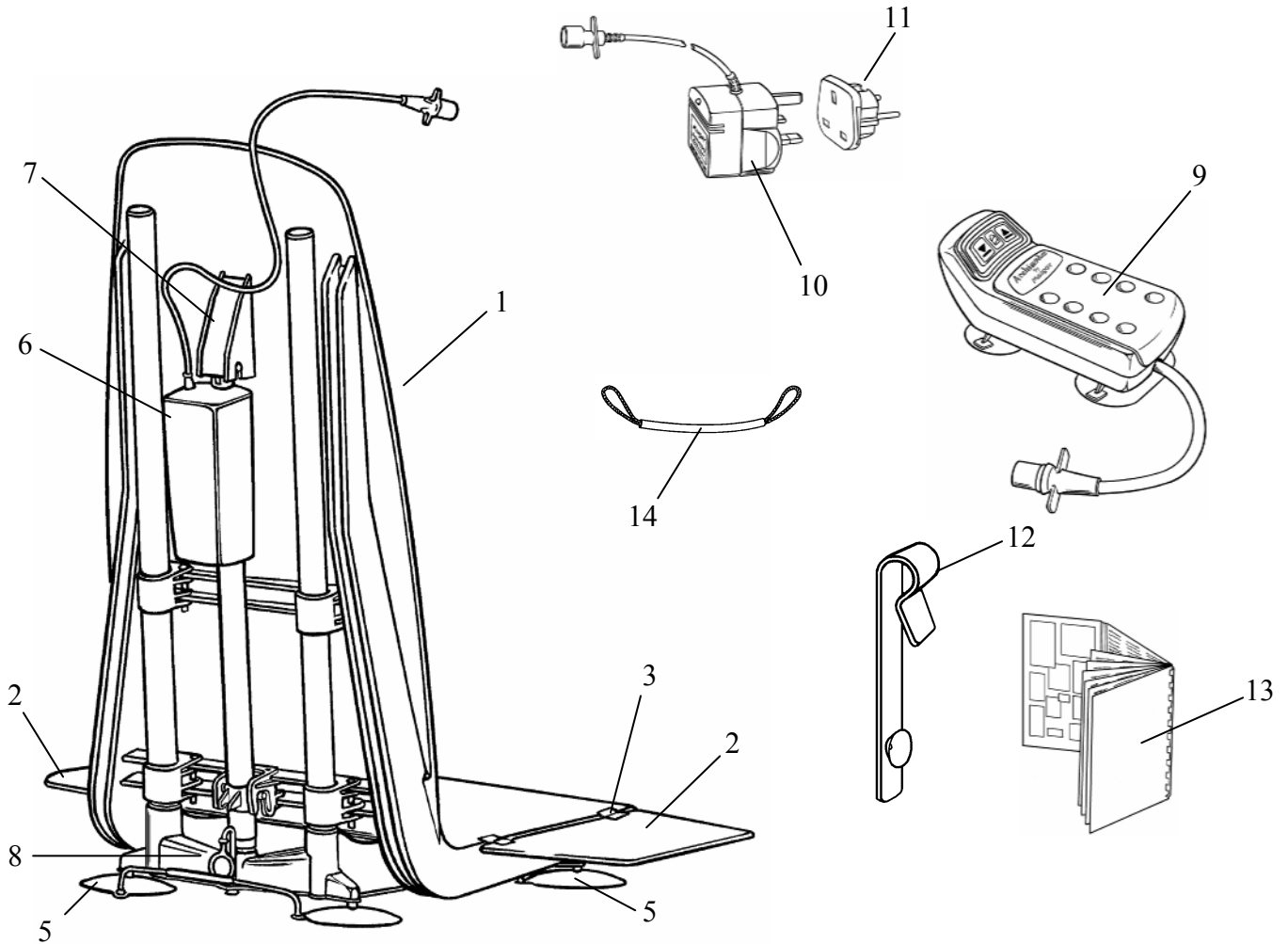

Symboly použité na značkách a v pokynech

	Pozor		Nebezpečné napětí		Provozní cyklus I = provozní doba O = doba mimo provoz		Stiskněte pro zvednutí sedátka
	Pokyny pro konzultaci		Zařízení typu B (ochrana proti elektrickému šoku)		Maximální váhový limit pro uživatele		Stiskněte pro spuštění sedátka
	Střídavý proud		Indikátor stavu baterie		Datum výroby	IP66	Utěsněno proti postříkání vodou
	Stejnsměrný proud		+45°C Max/Min provozní teplota okolního prostředí °C +4°C		Recyklujte – neodhazujte do běžného odpadu v domácnosti	IP67	Utěsněno proti pronikání vody – do hloubky 1 metru
	Zařízení třídy II s dvojitou izolací				Ni-Cd	IP50	Bez ochrany proti vnikání vody
	Nezapojovat k elektrické síti v koupelně nebo venku						



Mangar International Ltd, Presteigne, Powys, LD8 2UF, Wales, UK.
Tel: +44(0)1544 267674 Fax: +44(0)1544 260287 E-mail: customerservice@mangar.co.uk
Website: www.mangarinternational.co.uk