



CHODÍTKA

NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH

1.ÚVOD.....	str.13
2.POUŽITÍ	str.13
3.PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	str.13
4.OBECNÁ VAROVÁNÍ	str.13
5.OBECNÝ POPIS	str.13
5.1 Čtyřbodová chodítka	str.13
5.2 Chodítka se 2 otočnými kolečky a 2 hroty	str.14
5.3 Chodítka se 4 otočnými kolečky	str.14
5.4 Chodítka se 4 otočnými kolečky a brzdou.....	str.14
5.5 Nastavení výšky	str.14
6.PŘED POUŽITÍM	str.14
7.VAROVÁNÍ PRO UŽÍVÁNÍ	str.14
8.INSTRUKCE PRO SESTAVENÍ RP729X.....	str.15
9.ZPŮSOB POUŽITÍ	str.15
10.ÚDRŽBA	str.16
11.ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE	str.16
11.1 Čištění	str.16
11.2 Desinfekce.....	str.16
12.PODMÍNKY LIKVIDACE.....	str.16
12.1 Obecné podmínky likvidace.....	str.16
13.TECHNICKÉ VLASTNOSTI.....	str.17
13.1 Náhradní díly a příslušenství.....	str.19
14.ZÁRUKA.....	str.20
15.OPRAVA.....	str.20
15.1 Záruční oprava	str.20
15.2 Oprava, na niž se záruka nevztahuje	str.20
15.3 Nezjištění závady	str.20
16.NÁHRADNÍ DÍLY.....	str.20
17.ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI	str.20

CE I Třída zdravotnického prostředku podle směrnice 93/42 / EHS a dalších úprav

1. ÚVOD

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili chodítko MOPEDIA od společnosti Moretti S.p.A. Tento návod k použití obsahuje několik návrhů, jak správně používat výrobek, který jste si vybrali, a poskytuje cenné rady pro vaši bezpečnost. Před použitím výrobku si prosím pozorně přečtěte příručku. Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na svého prodejce a požádejte o radu a pomoc.

2. POUŽITÍ

Chodítka Mopedia od firmy Moretti jsou pomůcky určené pro používání dvěma rukama a jsou určena pro osoby s pohybovými obtížemi.



- Nepoužívejte výrobek pro účely, které nejsou uvedeny v tomto návodu;
- Společnost Moretti S.p.A odmítá jakoukoli odpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití tohoto výrobku a z neoprávněných úprav rámu výrobku;
- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu informací obsažených v tomto dokumentu bez předchozího upozornění.

3. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Moretti SpA tímto prohlašuje, na základě své výlučné odpovědnosti, že výrobky vyráběné a prodávané společností Moretti SpA a patřící do kategorie kompenzačních pomůcek jsou v souladu s platnými ustanoveními směrnice o zdravotnických prostředcích 93/42 / EEC a dalšími úpravami. Za tímto účelem Moretti S.p.A. zaručuje a prohlašuje na vlastní odpovědnost následovně:

1. Dotyčná zařízení splňují základní požadavky přílohy I směrnice 93/42 / EHS podle přílohy VII výše uvedené směrnice
2. Dotyčná zařízení **NEJSOU MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ**
3. Dotyčná zařízení **NEJSOU URČENÁ PRO KLINICKÉ VÝŠETŘENÍ**
4. Dotyčná zařízení se prodávají v **NESTERILNÍM** balení
5. Dotyčná zařízení by měla být považována za součást třídy I
6. **NEPOUŽÍVEJTE** / neinstalujte dotyčná zařízení k jinému účelu, než je výslovně uvedeno společností Moretti S.p.A.
7. Společnost Moretti S.p.A. uchovává a předkládá dokumentaci osvědčující shodu se směrnicí 93/42 /EHS příslušným orgánům a další úpravy.

4. OBECNÁ VAROVÁNÍ

- Před použitím pomůcky si pozorně **PŘEČTĚTE** celý manuál;
- Informujte se u lékaře nebo terapeuta ohledně správného nastavení a správného používání chodítka;
- Ujistěte se, že je výrobek dodán kompletní, a uchovávejte jej mimo dosah zdrojů tepla;
- **SERVISNÍ ŽIVOTNOST** je limit použití zařízení definovaný opotřebením dílů
- Nedovolte dětem hrát si s pomůckou nebo ji používat

5. OBECNÝ POPIS

5.1 Čtyřbodová chodítka

- | | |
|-------------------|--|
| RP729S-M-L | Pevné chodítko s nastavitelnou výškou |
| RP730S-M-L | Skládací chodítko s nastavitelnou výškou |
| RP731 | Skládací chodítko s nastavitelnou výškou - dětský model |
| RP747 | Skládací chodítko s nastavitelnou výškou - dvojité madla |
| RP749S-M-L | Skládací chodítko s nastavitelnou výškou - dvojí funkce |

5.2 Chodítka s 2 otočnými kolečky a 2 hroty

RP734 Skládací chodítko, nastavitelná výška, 2 otočná kolečka a 2 hroty

RP735S-M-L Skládací chodítko, nastavitelná výška, 2 pevná kolečka a 2 hroty

RP736 Skládací chodítko, nastavitelná výška, 2 kolečka, dětský model

RP737 Skládací chodítko, nastavitelná výška, 2 pevná kolečka a 2 hroty

RP744 Skládací chodítko, nastavitelná výška, 2 otočná kolečka a 2 hroty

RP745 Skládací chodítko, nastavitelná výška, 2 pevná kolečka a 2 hroty

5.3 Chodítka se 4 otočnými kolečky

RP733S-M-L Skládací chodítko, nastavitelná výška, 4 otočná kolečka

RP738 Skládací chodítko, nastavitelná výška, 2 samosvorná kolečka a 2 otočná kolečka

RP741 Skládací chodítko, nastavitelná výška, 4 otočná kolečka, 2 s brzdou

RP748 Rozložitelné chodítko, nast., výška, 2 otočná kolečka s brzdou a 2 otočná kolečka

5.4 Chodítka se 4 otočnými kolečky a brzdou

RP742 Skládací chodítko s ruční brzdou

Chodítka MOPEDIA jsou vyráběna z lehké eloxované hliníkové trubky s polstrovanými rukojeťmi, protiskluzovými pryžovými násadci a / nebo otočnými kolečky a / nebo pevnými kolečky. Jsou výškově nastavitelná v 2,5 centimetrových krocích. Tyto pomůcky usnadňují pohyb osob s omezenou statickou rovnováhou a / nebo dynamikou, tím, že zvyšuje jejich podpěrnou základnu. Poskytují podporu v situacích slabosti a / nebo paralýzy dolních končetin. Pomáhají přenášet část váhy osoby na ruce, pokud je vyžadováno omezení zátěže na jedné nebo obou dolních končetinách.



5.5 Nastavení výšky

Pro nastavení výšky stiskněte tlačítko a posuňte nohu chodítka do požadované výšky. Po dokončení zkontrolujte, zda tlačítko zcela vyčnívá z požadovaného otvoru. Opakujte popsany postup pro každou nohu, na konci zkontrolujte, zda všechny čtyři nohy mají stejnou výšku. Maximální nosnost je 130 kg, pouze 110 kg u modelu RP729x a 60 kg pro dětský model (RP731-RP736).

6. PŘED POUŽITÍM

- Před použitím chodítka vždy zkontrolujte, zda brzdy fungují, jsou-li k dispozici;
- Nepoužívejte chodítko, pokud je poškozené nebo nefunkční (případně kontaktujte dodavatele);
- Zkontrolujte, zda není rám poškozen, aby bylo zaručeno bezpečné používání pro osoby a věci;
- Uživatelé musí pro chůzi využívat pěší cesty a ne rušné silnice;
- Věnujte pozornost možnosti poranění v důsledku zachycení; nepokládejte prsty mezi pohyblivé části chodítka. Pozor na skládání a rozkládání chodítka.

7. VAROVÁNÍ PRO POUŽÍVÁNÍ

Toto zařízení poskytuje větší stabilitu, podporu a bezpečnost při pohybu. V žádném případě jej nemohou používat lidé s viditelně oslabenou funkcí ruky a / nebo paže a ani lidé s problémy s rovnováhou. Chodítko lze použít jak venku, tak uvnitř. Doporučujeme používat pouze na takovém povrchu, kde se všechny čtyři nohy dotýkají země. Nesmí se používat na skalnatém terénu nebo na šikmých plochách, protože se zde chodítko může stát nestabilním. Pomůcka není určena pro přepravu osob nebo jiného materiálu.

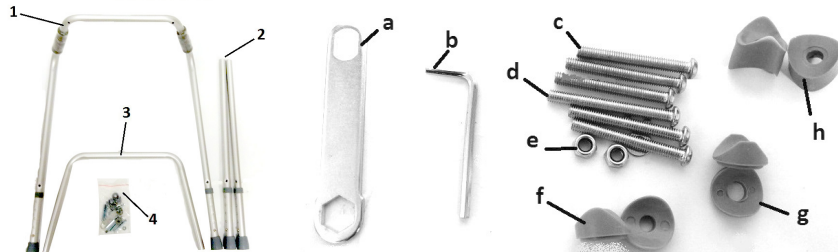
- Dodržujte zvýšenou opatrnost na mokřem a kluzkém povrchu;
- NEPOUŽÍVEJTE s pacientem, který překračuje hmotnost uvedenou na etiketě výrobku a v technické kapitole této příručky;
- Vyhněte se použití na svazích větších než 10 stupňů a při otáčení se na svahu nahoru nebo dolů by uživateli měla asistovat doprovázející osoba;
- Nenechávejte přístroj po dlouhou dobu v kontaktu s vodou;
- Pravidelně kontrolujte jeho pevnost, stabilitu a pryžové násadce, zda jsou v dobrém stavu. V případě opotřebení je vyměňte;
- V případě pochybností o použití, seřízení nebo údržbě kontaktujte svého prodejce;

- Chodítko uchovávejte mimo dosah dětí, aby se předešlo možným rizikům.


8. INSTRUKCE PRO SESTAVENÍ RP729X

Seznam dílů

1. Hlavní rám (1ks)
2. Nohy (2ks)
3. Ohnutá vzpěra (1ks)
4. Montážní sada (1ks)




- Otevřete montážní sadu a začněte sestavování tím, že se vezmete hlavní rám (1)
- Na hlavní rám (1) : přimontujte nohy (2), podložte sedlovými podložkami (g) a přišroubujte krátkými šrouby (c). Šrouby zatím zcela nedotahujte.
- K hlavnímu rámu (1) dále připevněte ohnutou vzpěru (2) za použití sedlových podložek (h), dlouhých šroubů (d), a matic s podložkou (e). Opět šrouby zatím zcela nedotahujte.
- Přišroubujte k hlavnímu rámu (1): ohnutou trubku (2) za použití sedlových podložek (f) a krátkých šroubů (c). Šrouby zatím zcela nedotahujte.
- Dotáhněte všechny šrouby, chodítko je nyní připraveno k použití. (Postupujte dle obrázku)

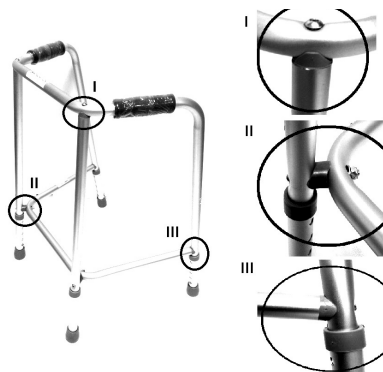

9. ZPŮSOB POUŽITÍ

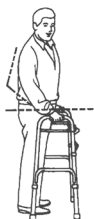
POZNÁMKA: Dbejte bezpečnostních pokynů v této příručce. Použijte chodítko jako pomůcku pro chůzi. K tomu použijte dvě rukojeti a posuňte chodítko dopředu, čímž získáte vhodnou a spolehlivou podporu pro chůzi.



S volně visící paží by měla být rukojeť ve výšce zápěstí. S rukou položenou na rukojeti by měl být loket ohnutý o 20 ° - 30 °.



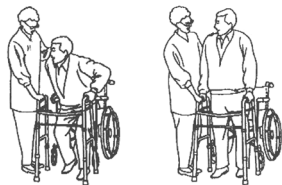- Věnujte pozornost přítomnosti elektrických vodičů, mokrých povrchů, koberců, hraček nebo nečistot, nábytku, malých schodů a mezer v podlahách. Nepoužívejte chodítko na schodech nebo eskalátorech.



1. Pro přesun pacienta z invalidního vozíku na chodítko se ujistěte, že jsou kolečka invalidního vozíku a chodítka, pokud je to možné, zabrzděna.



- Pro přesun na chodítko a první kroky s ním využijte pomoci druhé osoby.



2. a) Chodítko s násadci: při chůzi chodítko zvedněte a pohodlně umístěte před Vámi, aby všechny čtyři nohy byly na podlaze. Chodte opatrně, krok za krokem.

b) Chodítko s kolečky: pohodlně tlačte chodítko před Vámi tak, aby všechny čtyři nohy, i ty s kolečky i ty s násadci, byly na podlaze. Chodte opatrně, krok za krokem.

POZNÁMKA: Chodítko je třeba vždy držet za rukojeti.



Netlačte chodítko příliš daleko od těla. To může způsobit pád a nedostatečné zatížení.

10. ÚDRŽBA

Produkty Mopedia od firmy MORETTI jsou pro uvedení na trh pečlivě zkontrolovány a opatřeny značkou EC. Pro bezpečnost pacientů a lékařů doporučujeme nechat výrobek zkontrolovat výrobcem nebo laboratoří schválenou každé dva roky. Pro periodické kontroly se rozumí zkoumání následujících částí:

- Rám chodítka a spojovací prvky;
- Kontrola montáže a funkce koleček s brzdou;
- Kontrola všech svarů;
- Kontrola opotřebení násadců, v případě jejich použití;

V případě opravy používejte pouze schválené díly a příslušenství.

11. ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE

11.1 Čištění

K odstranění prachu používejte pouze vlhký hadřík, použijte vlhký hadřík s jemným mýdlem, abyste odstranili obtížnější nečistoty. Před použitím důkladně osušte. Nikdy nepoužívejte vodu s teplotou nad 30 °C. Nikdy nepoužívejte proudovou vodu nebo parní čističku.

11.2 Desinfekce

Pokud potřebujete dezinfikovat, použijte běžný dezinfekční prostředek.

POZNÁMKA: Nikdy nepoužívejte kyseliny, zásady nebo rozpouštědla, jako je aceton

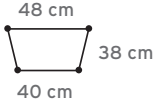
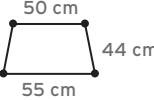
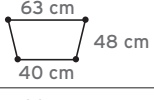
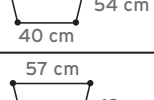
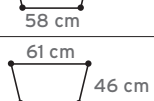
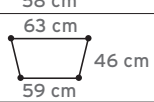
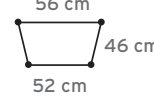
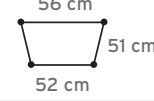
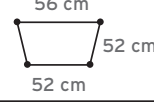
12. PODMÍNKY LIKVIDACE









12.1 Obecné podmínky likvidace





V případě likvidace nepoužívejte běžný kontejner pro komunální odpad. Doporučujeme zařízení zlikvidovat v odpovídajících prostorách pro recyklaci.

13. TECHNICKÉ VLASTNOSTI


Kódy	Nosnost	Nastavitelná výška po 2,5 cm	Násadce/kolečka	Základna*
RP731 (Dětské)	60 kg	od 53 do 62,5 cm	4 násadce	
RP736 (Dětské)	60 kg	od 41 do 60 cm	2 násadce a 2 kolečka	
RP729S	110 kg	od 67 do 74,5 cm	4 násadce	
RP729M		od 77 do 84,5 cm		
RP729L		od 87 do 94,5 cm		
RP730S	130 kg	od 65 do 75 cm	4 násadce	
RP730M		od 73 do 83 cm		
RP730L		od 80 do 97,5 cm		
RP749S	130 kg	od 72 do 82 cm	4 násadce	
RP749M		od 82 do 92 cm		
RP749L		od 85 do 103 cm		

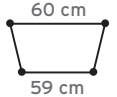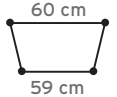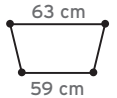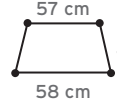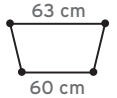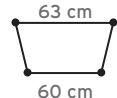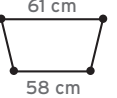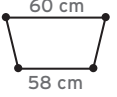Kódy	Nosnost	Nastavitelná výška po 2,5 cm	Násadce/kolečka	Základna*
RP747	130 kg	od 50/70 do 79/96 cm	4 násadce	
RP735S	130 kg	od 65 do 75 cm	2 násadce a 2 kolečka	
RP735M	130 kg	od 72 do 82 cm	2 násadce a 2 kolečka	
RP735L	130 kg	od 80 do 97,5 cm	2 násadce a 2 kolečka	
RP745	130 kg	od 80 do 97,5 cm	2 násadce a 2 kolečka	
RP737	130 kg	od 82 do 99 cm	2 násadce a 2 kolečka	
RP734	130 kg	od 82 do 99 cm	2 násadce a 2 kolečka	
RP744	130 kg	od 85 do 102,5 cm	2 násadce a 2 kolečka	
RP738	130 kg	od 85 do 103 cm	4 kolečka	
RP733S	130 kg	od 68 do 78 cm	4 kolečka	

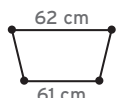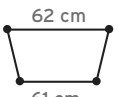
Kódy	Nosnost	Nastavitelná výška po 2,5 cm	Násadce/kolečka	Základna*
RP733M	130 kg	od 75 do 85 cm	4 kolečka	
RP733L	130 kg	od 85 do 103 cm	4 kolečka	
RP741	100 kg	od 85 do 95 cm	4 kolečka 2 s brzdou	
RP742	130 kg	od 80 do 98 cm	4 kolečka s brzdou	
RP748	130 kg	od 76 do 91 cm	4 kolečka s brzdou	
RP748L	100 kg			

* Rozměry měřené při dolním nastavení výšky. Měření se může lišit ± 1 cm

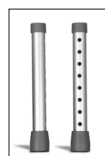
13.1 Náhradní díly a příslušenství




RV7056
Náhradní nohy
pár

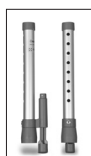


RV7052
Kluzná brzda
1 ks
s držákem
pár

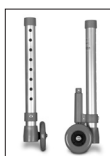

RV7053
Kluzná brzda
kola
pár

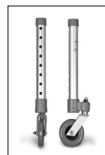

RV7054-8
otočná kolečka
k chodítku
pár
(ø int. 2,6cm)

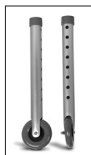

RV7055-8
Pevná kolečka
pár - 8 děr



RV7055-5
Pevná kolečka
pár - 5 děr



RV7154-8
Otočná kolečka
pár - 8 děr
Ø 12cm



RV7155-8
Pevná kolečka
pár - 8 děr
Ø 12cm



RV7035
Přyzové
násadce
pro RP729
pár



RV7030
ø28mm
Sedé pryžové
násadce - pár



RV7031
ø28mm
Černé pryžové
násadce - pár



RV7045
Košík pro
krokovací
skládací
chodítko



RV7046
Košík pro
pevné
skládací
chodítko



RV7114
Anti-brachiální
podpora - pár

14. ZÁRUKA

Na Výrobky Moretti se vztahuje záruka na materiálové nebo výrobní vady po dobu (dvou) 2 let od data nákupu, s výhradou omezení a výjimek uvedených níže. Záruka se nevztahuje na případy škody způsobené nesprávným použitím, zneužitím nebo úpravou výrobku a záruka nebude platná, pokud nebudou přísně dodrženy pokyny pro použití. Správné zamýšlené použití zařízení je uvedeno v této příručce.

Společnost Moretti neodpovídá za škody vzniklé v důsledku zranění osob nebo jinak způsobené nesprávnou instalací nebo nesprávným použitím nebo v souvislosti s ní. Společnost Moretti neručí za škody na výrobcích nebo vady za následujících podmínek: přírodní katastrofa, neautorizovaná údržba nebo oprava, poškození způsobené problémy s napájením (pokud je k dispozici) použití náhradních dílů nedodaných společnostmi Moretti, nesprávné použití, nepovolená změna, poškození při přepravě (jiné než původní balení Moretti), nebo v případě nedostatečné údržby, jak je uvedeno v návodu. Záruka se nevztahuje na součásti podléhající opotřebením během správného používání zařízení.

15. OPRAVA

15.1 Záruční oprava

V případě, že výrobek Moretti bude mít v záruční době vady materiálu nebo výrobní závady, společnost Moretti potvrdí zákazníkovi, zda se na závadu vztahuje záruka. Společnost Moretti může podle vlastního uvážení opravit nebo vyměnit předmět záruky v obchodním zastoupení Moretti nebo v místě výroby. Mzdové náklady na opravu mohou být společnosti Moretti účtovány v případě, že se na opravu vztahuje záruka. Oprava nebo výměna záruky neobnovuje ani prodlužuje záruku.

15.2 Oprava, na níž se záruka nevztahuje

Výrobek, na který se nevztahuje záruka, může být vrácen k opravě pouze po předchozím souhlasu zákaznického servisu Moretti. Náklady na práci a dopravu za opravu, na kterou se nevztahuje záruka, nese zákazník nebo prodejce. Na opravy výrobků, na které se nevztahuje záruka, je poskytována záruka po dobu šesti (6) měsíců od data obdržení opraveného výrobku.

15.3 Nezištění závady

Zákazník bude informován, pokud Moretti po přezkoumání a otestování vráceného výrobku prohlásí, že výrobek není vadný. V tomto případě bude zboží vráceno zákazníkovi, veškeré náklady na dopravu hradí zákazník.

16. NÁHRADNÍ DÍLY

Na originální náhradní díly Moretti je poskytována záruka 6 měsíců od data obdržení.

17. ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

S výjimkou případů výslovně uvedených v této záruce a v mezích zákonů společnost Moretti nenabízí žádné prohlášení, záruky ani podmínky, výslovně ani předpokládané, včetně jakýchkoli prohlášení, záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování a rušení. Společnost Moretti neručí za to, že používání výrobku Moretti bude bez přerušení nebo bez chyb. Trvání jakýchkoli implikovaných záruk, které mohou být uloženy zákonem, je omezeno na záruční dobu v mezích zákona. Některé státy neumožňují omezení délky předpokládané záruky nebo vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod v souvislosti s produkty pro spotřebitele. V těchto státech nebo zemích se na vás nemusí vztahovat určitá vyloučení odpovědnosti a omezení této záruky. Tato záruka může být změněna bez předchozího upozornění.



MOPEDIA®

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobek _____

Datum pořízení _____

Dodavatel _____

Adresa _____ Město _____

Zákazník _____

Adresa _____ Město _____



MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C

PRAHA

Ronkova 13/353
180 00 Praha 8

Tel./fax: 266 313 652

ortoservis@ortoservis.cz

BRNO

Minská 100
616 00 Brno - Žabovřesky

Tel./fax: 541 240 393

brno@ortoservis.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Staroměstská 2608
370 04 České Budějovice

Tel./fax: 387 432 502

cb@ortoservis.cz

OPAVA

Pivovarská 7/71
746 01 Opava

Tel./fax: 553 775 226

opava@ortoservis.cz

www.ortoservis.cz

Společnost je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 72014.

MORETTI S.p.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Caviglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com