

	Ziółkowski Juventas S.K.A. Srogów Górny 172, 38-507 Jurowce, Poland tel/fax: +48 13 463 80 35 com. +48 608074052 e-mail: biuro@juventas.pl www.juventas.pl	
	Návod k použití - Vyšetřovací křeslo	
	JFZ 1; JFZ 2; JFZ 3; JFZ 4	
<i>Přesné technické specifikace jsou k dispozici na adrese www.juventas.pl.</i>		
Určené použití	• Vyšetřovací křeslo se používá k polohování pacienta během vyšetření, léčby nebo drobných lékařských zákroků.	
Montáž a provoz	• Umístěte křeslo na místo určení. Vyrovnajte křeslo pomocí nožiček (JFZ 1, JFZ 2, JFZ 3, JFZ 4) (zašroubováním nebo vyšroubováním) nebo jej stabilizujte zablokováním • koleček brzdami (varianta K). Uživatelem křesla by měla být kvalifikovaná osoba, která by měla provádět zákroky na křesle v souladu s jeho určeným použitím. Měla by také umístit pacienta do vhodné polohy a pomáhat mu při usedání a vstávání z křesla. • Nastavení úhlu opěrky nohou a/nebo opěradla. Provádí se ručně pomocí plynových pružin. Zvednutím páčky umístěné na nastavitelné části se uvolní pružina a umožní nastavení horní části do požadovaného úhlu, uvolněním páčky se tato část zablokuje. • Nastavení výšky pomocí ručního dálkového ovladače (JFZ 3, JFZ 4). • Před zahájením práce připojte křeslo k napájení 230 V. Výška leho-sedačky se nastavuje pomocí ručního ovladače stisknutím příslušného tlačítka se šipkou dolů (snížení leho-sedačky) nebo se šipkou nahoru (zvednutí leho-sedačky). Uvolněním tlačítek se leho-sedačka zastaví v požadované výšce. • Nastavení pomocí nožního dálkového ovladače (JFZ 3, JFZ 4). Před zahájením práce připojte křeslo k napájení 230 V. Výšku lehátka nastavte pomocí nožního dálkového ovladače stisknutím jednoho tlačítka (snížení lehátka) a druhého tlačítka (zvýšení lehátka). Uvolněním tlačítek se lehátko zastaví v požadované výšce. • Montáž stojanu na infuzi, boční police a područek. Nasuňte rukojeti jednotlivých dílů na kolejnice umístěné pod sedadlem na obou stranách křesla a poté do nich zasuněte jednotlivé části vybavení. • Po výběru požadované polohy utáhněte přítlačné šrouby umístěné u otvorů pro rukojeti. • Montáž držáku na papírovou roli. Zavěste držák do drážek umístěných za sedadlem. • Nastavení koleček. Kolečka se zablokují stlačením brzdové nohy vedle každého kolečka. Zvednutím brzdové nohy u každého kolečka se kolečka odblokuji.	
Indikace pro použití	• Provádění drobných zákroků a diagnostiky pacientů	
Problémy s užíváním	• Provádění zákroků na pacientech s hmotností vyšší, než je maximální • zatížení křesla stanovené výrobcem	
Dezinfekce	• Aby se zabránilo infekci kůže pacienta, je třeba křeslo před zákroky dezinfikovat. • Pro kožené čalounění (Standard Line) se doporučuje použít přípravek jako Glucoprotamine nebo isopropylalkohol v maximální koncentraci 70 %. K dezinfekci vinylového čalounění (Exclusive Line) se doporučuje použít přípravky jako: Antibac, Brial, Desomed	

Čištění	• Zdravotnický prostředek lze čistit mírně navlhčeným hadříkem a jemným čisticím prostředkem. Nepoužívejte prostředky obsahující volný kyslík nebo chlor – mohly by způsobit poškození čalounění a laku.
Údržba	Jednou za čtvrt roku. • Kontrola plynových pružin. Správnou funkci pohonů je nutné zkontrolovat vizuální prohlídkou. Jakékoli selhání funkce a úniky je nutné neprodleně nahlásit společnosti JUVENTAS. Servis jednou za šest měsíců. • Kontrola pohyblivých spojů. Všechny pohyblivé spoje by měly být mazány jednou za šest měsíců nebo v případě, že se během provozu objeví hlasité zvuky. Jako opatření doporučujeme používat běžně dostupné maziva. • Kontrola šroubových spojů. Šroubové spoje by měly být zkontrolovány z hlediska správnosti a v případě potřeby by mělo být odstraněno jejich uvolnění. Pokud to není možné, okamžitě to nahláste společnosti JUVENTAS. Kontrola napájecích a signálních kabelů. Je nutné zkontrolovat izolaci kabelů. Jakékoli poškození nebo oděrky je nutné nahlásit výrobci. V takovém případě je nutné křeslo vyřadit z provozu. Pravidelné zkoušky elektrické bezpečnosti. • Nejméně jednou za dva roky a pokaždé po poruše/opravě elektrických součástí sedadla musí být sedadlo zkontrolováno z hlediska elektrické
Servisní prohlídky	• bezpečnosti. Výrobky by měly být podrobeny pravidelným – dvouletým – kontrolám
Životnost	• prováděným servisním oddělením výrobce. • Výrobek má životnost 15 let od data zakoupení, pokud je • pravidelně servisován.
	• Všechny procedury musí provádět kvalifikovaný personál, • je zakázáno používat vadné nebo poškozené křeslo, • před zahájením procedur je nutné křeslo vyrovnat a stabilizovat, • dezinfekce křesla by měla být prováděna před každou procedurou pro • každého • pacienta, • pacienta je nutné uklidnit při zvedání a spouštění z křesla, • před nastavením křesla je nutné zkontrolovat, zda pacient nemá • ruce v blízkosti nastavitelných mechanismů, • Je zakázáno sestupovat ze sedadla se zvednutou deskou stolu. • Je zakázáno nechávat pacienta na křesle bez dozoru. • Je zakázáno pohybovat s křeslem s pacientem. • Je zakázáno překračovat přípustné zatížení. • Je zakázáno otevírat pohony, plynové pružiny a jiné mechanické součásti stolu. • Je zakázáno sedět na podhlavníku nebo okrajích sedadla.
Vybavení	K kolečka W70 držák na roli papíru 70 cm SKS IV-tyč PN nožní dálkové ovládání PŁB boční polička
Release version 08_2020	