


TOALETNÍ ŽIDLE S TOALETNÍ NÁDOBOU

Art. 302013

Uživatelská příručka



Toaletní židle s
toaletní
nádobou

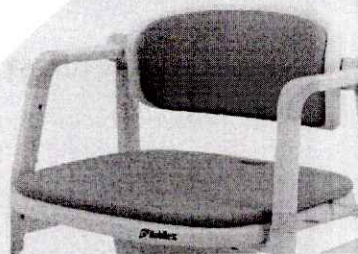

Toaletní židle je vybavena
snadno odnímatelnými
polštáři EVA na sedáku a
opěradle.



Snadné
nastavení
výšky



Toaletní nádoba se snadno
zasune do sedátka a lze
jej vyjmout zatažením za
rukojeť nádoby.



Mobilex A/S
Grønlandsvej 5, 8660 Skanderborg,
Denmark,
www.mobilex.dk

Mobilex Sp. z o.o.
ul. Duńska 3/5, 91-204 Łódź
tel.: (0-42) 214-29-11
www.mobilex.pl

1. Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili vysoce kvalitní produkt Mobilex. Tento návod k použití obsahuje popis a důležité informace o používání zdravotnického prostředku. Má vám pomoci při správném a bezpečném používání výrobku. Je velmi důležité, abyste si návod před použitím výrobku pečlivě přečetli. Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům a vždy je dodržujte. Společnost Mobilex se neustále snaží své výrobky vylepšovat a modernizovat. Proto si vyhrazujeme právo na změnu specifikací a technických údajů výrobku bez dalšího upozornění.

Zamýšlené použití zařízení

Toaletní židle s toaletní nádobou je zdravotnický prostředek určený pouze k použití jako podpora při sezení pro osoby, které tuto pomoc potřebují při převážně samostatném používání toalety, koupání nebo sprchování (koupelna musí být kompatibilní). Zařízení plní základní funkci a výrazně usnadňuje život tělesně postiženému uživateli i asistentovi. Zařízení by se mělo používat pouze v interiéru. Jakékoli jiné použití je zakázáno.

Indikace

Zařízení je určeno pro osoby s funkčním omezením, osoby na invalidním vozíku a další osoby s omezenou pohyblivostí bederní páteře, kolen nebo kyčlí a pro všechny, kteří mají potíže s prováděním každodenní osobní hygieny ve stoje. Jakékoli jiné než výše uvedené použití je zakázáno.

Kontraindikace

Zařízení není určeno pro pacienty, kteří nedokážou udržet správnou rovnováhu těla vsedě a vestoje. Zařízení se nesmí používat, pokud má uživatel zhoršené vnímání. Kontraindikace nelze vztahovat k jednomu konkrétnímu klinickému obrazu a závisí na individuálním posouzení zdravotního stavu potenciálního uživatele. Výběr ortopedické pomůcky vhodné pro daný klinický obraz musí být vždy proveden s pomocí odborného lékaře nebo fyzioterapeuta. Kromě toho dodržujte bezpečnostní informace uvedené v kapitole 2.

Oblasti použití

Výrobek lze použít v domácí péči, zdravotnických zařízeních a zařízeních dlouhodobé péče a v nemocnicích.

Zdravotní příhody a nežádoucí události

V případě nežádoucích událostí souvisejících se zařízením se obraťte na prodejce nebo výrobce:

Moblex A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Denmark	Phone: +45 87 93 22 20 Telefax: +45 87 93 17 77 Email: info@mobilex.dk
--	--

2. Bezpečnostní požadavky

- Ujistěte se, že si tuto příručku přečetly všechny osoby, které přístroj používají.
- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody a/nebo zranění vzniklé v důsledku nedodržení návodu k obsluze.
- Výrobek používejte pouze v bezvadném stavu.
- V případě zjištění závad nebo chyb musíte okamžitě přestat přístroj používat a kontaktovat prodejce.
- Dodržujte všechna doporučení a varování výrobce.
- Dbejte na informace uvedené na štítku výrobku.
- Výrobek používejte pouze k popsanému účelu.
- Na zařízení nestoupejte.
- Neprovádějte na zařízení konstrukční změny, pokud nemáte písemný souhlas výrobce s takovými úpravami.
- Zařízení nesmí být zatíženo větší hmotností, než je uvedeno v Technických údajích.
- Zařízení se smí používat pouze na stabilním povrchu.
- Při montáži nebo seřizování jakýchkoli částí zařízení dbejte zvýšené opatrnosti.
- Ujistěte se, že jsou všechny nohy nastaveny do stejné výšky.
- Zařízení používejte pouze na rovném hladkém povrchu se všemi 4 nohami stabilně umístěnými na povrchu.
- Před použitím vždy zkontrolujte stabilitu zařízení.
- Nestůjte na zařízení.
- Před použitím toaletního křesla se ujistěte, že je každý montážní šroub bezpečně zajištěn.
- Na boční trubky netlačte žádné tvrdé předměty, protože by mohlo dojít k poškození bočních trubek nebo polštáře.
- Nedotýkejte se rukama nebo prsty pohyblivých částí, aby nedošlo ke zranění.

Dodávané díly

Zařízení se dodává v papírové krabici. Obsahem balení je:

- ✓ 1 Hlavní rám včetně sedadla a opěrek;
- ✓ 4 nohy;
- ✓ 1 opěradlo;
- ✓ 1 toaletní nádoba a víko;
- ✓ 2 polštáře, jeden na opěradlo a jeden na sedadlo;
- ✓ 1 mýdlenka;
- ✓ 1 držák toaletního papíru;
- ✓ 2 šrouby;
- ✓ 1 návod k použití;

Předběžná kontrola

Zkontrolujte obsah krabice s výše uvedeným seznamem. Pokud v této fázi zjistíte, že některý díl chybí nebo je poškozen, neprodleně kontaktujte svého dodavatele.

3. Popis

Popis produktu


Toaletní židle s toaletním kbelíkem je určena pro osoby, které potřebují oporu při použití toalety nebo při sprchování. Židle je vybavena snadno odnímatelnými polštáři EVA na sedáku a opěradle. Má hliníkový rám s odklopnými područkami, výškově nastavitelné nohy, toaletní nádobu, víko a opěradlo. Pro větší pohodlí se dodává také s mýdlenkou a držákem toaletního papíru.

Zařízení se skládá z následujících prvků:

1. Odklopitelná loketní opěrka
2. Opěradlo
3. Sedadlo
4. Víko
5. Toaletní nádoba
6. Výškově nastavitelná noha
7. Protiskluzový gumový násadec

Popis sestavy

Chcete-li sestavit toaletní židli, musíte nejprve položit hlavní rám vzhůru nohama a vložit 4 nohy do rámu tak, že stisknete zajišťovací drážku na každé noze a zasunete nohy do určených otvorů, dokud zajišťovací drážka nevyskočí. Otočte židli na nohy a připevněte opěradlo tak, že jej zarovnáte k zadní trubce a utáhnete 2 šrouby dodané zezadu. Poté vložte nádobu a umístěte víko do sedadla. Připevněte misku na mýdlo a držák toaletního papíru po stranách židle tak, že je zasunete do určených otvorů. Nakonec připevněte sedák a opěradlo z materiálu EVA jejich zatlačením do příslušných otvorů.

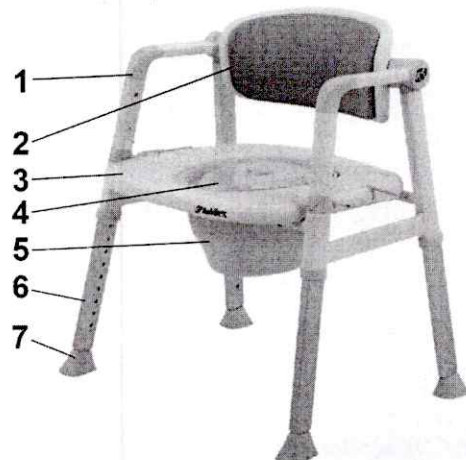

*sedák je pro potřeby ukázky vyjmutý

Popis funkce


Odklopení / sklopení loketní opěrky

Opěrky rukou odklopíte stisknutím tlačítka na vnitřní straně trubky opěrky rukou a současným vytažením trubky nahoru.

Chcete-li opěrky sklopit a zajistit, držte trubku opěrky a tlačte ji dolů, dokud neuslyšíte zvuk "cvaknutí". Ujistěte se, že upevňovací kolík zaskočil do otvoru pod tlačítkem loketní opěrky.

POZOR! Opěrku neodklápějte ani nesklápějte nadměrnou silou, aby nedošlo k poškození dílů.

POZOR! Při sklápění loketní opěrky nekládejte ruce pod opěrku, abyste si neporanili ruce.

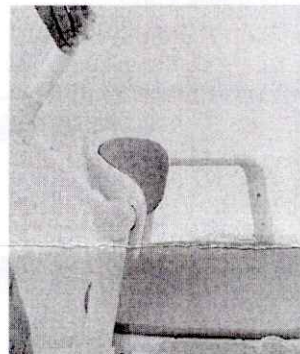

Loketní opěrka v otevřené poloze

Nastavení výšky toaletního křesla

Chcete-li nastavit výšku toaletní židle, musíte nastavit délku všech nohou na požadované nastavení. Chcete-li nastavit délku jedné nohy, stiskněte zajišťovací rozdvojku na vnitřní straně nohy a posuňte nohu do požadovaného nastavení, přičemž se ujistěte, že zajišťovací rozdvojka vyskočí. Všechny nohy by měly být nastaveny do stejné výšky.

POZOR! Nenastavujte výšku toaletní židle, když na ní někdo sedí, a vždy se ujistěte, že všechny zajišťovací šterbiny vyskočily.

POZNÁMKA: Výška sedátka je správně nastavena, když uživatel sedí na toaletním křesle a oběma chodidly se dotýká země.

Příslušenství

K tomuto zařízení není dodáváno žádné příslušenství.

4. Technické údaje

Toilet chair with toilet bucket	Art. 302013
Celková velikost (D x Š x V)	51,6 - 58,7 x 64,5 - 67,5 x 72 - 92 cm
Šířka mezi loketními opěrkami	44 cm
Výška	72 - 92 cm
Rozsah nastavení výšky sedadla	44,5 - 64,5 cm
Hmotnost výrobku	7 kg
Maximální hmotnost uživatele	150 kg

Štítek výrobku



Příklad označení výrobku

5. Péče a údržba

Běžné nečistoty lze odstranit běžnými čistícími prostředky a houbou nebo měkkým hadrem. Zkontrolujte informace o konkrétním výrobku a používejte pouze komerční čistící prostředky, které jsou vhodné k čištění. Celý výrobek lze dezinfikovat komerčně dostupným dezinfekčním prostředkem. Při dezinfekci vždy dodržujte pokyny výrobce dezinfekčního prostředku pro použití a bezpečnost.

Navzdory pevné konstrukci a použití odolných materiálů podléhá výrobek opotřebení. Proto se doporučuje výrobek pravidelně kontrolovat odborným servisem. Doporučujeme následující postup:

- ✓ Čištění a dezinfekce výrobku
- ✓ Kontrola rámu, zda není ohnutý, poškozený, opotřebený nebo zkorodovaný.
- ✓ Kontrola opotřebitelných dílů a jejich případná výměna.
- ✓ Celkové dotažení součástí

Doporučená životnost: Obvykle 10 let, v závislosti na použití.

Skladování: Doporučujeme skladovat na suchém místě při teplotách nad 0 °C.

Doprava

Zařízení by mělo být přepravováno stabilizovaným a zajištěným způsobem bez rizika náhlých nebo nebezpečných pohybů během přepravy.

Opakované použití

Výrobek je vhodný k opakovanému použití. Než výrobek převezme nový uživatel, musí být přístroj zkontrolován po technické stránce a vydezinfikován podle bodu 5.

6. Nejčastější problémy a jejich řešení

Problémy	Možné příčiny	Řešení
Toaletní židle není stabilní	Nohy jsou nastavené do různých výšek	Nastavte všechny nohy do stejné výšky

7. Likvidace výrobku

Výrobek nelze likvidovat společně s domovním odpadem a je nutné jej odevzdat do místního recyklačního centra.

8. Záruční podmínky

Společnost Mobilex A/S poskytuje dvouletou záruku na škody způsobené chybami ve výrobě nebo chybami materiálu. Záruka se nevztahuje na neúmyslné opravy nebo používání výrobku. Na díly podléhající běžnému opotřebení se záruka nevztahuje, pokud opotřebení není způsobeno výrobní vadou. Pokud jsou na výrobku provedeny změny bez našeho písemného souhlasu, označení CE a záruka na výrobek nejsou platné. V případě poškození výrobku, na které se vztahuje tato záruka, informujte svého prodejce nebo přímo společnost Mobilex A/S. Záruka se nevztahuje na náklady na dopravu a nezahrnuje náhradu za zranění osob nebo nepoužívání výrobku během opravy. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nedodržením uživatelské příručky.

9. Prohlášení o shodě

Výrobek prošel posouzením shody podle nařízení EU: MDR 2017/745 týkající se zdravotnických prostředků a je označen CE. Pro tento prostředek bylo vydáno prohlášení o shodě, které je k dispozici na adrese:

mobilex.dk/medias/2025-03/ce_302013_18646.pdf

nebo prostřednictvím QR kódu vpravo.



	QR kód odkaz na domovskou stránku		Označení CE
	Výrobce		Datum výroby
	Přečtěte si návod k použití		Nosnost
	Výrobní číslo		Zdravotnický prostředek
	Číslo položky		Pouze pro použití v interiéru
	Max. šíře		

Význam ikon