


AKTIV ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY S.R.O.

---

# NÁVOD K POUŽITÍ

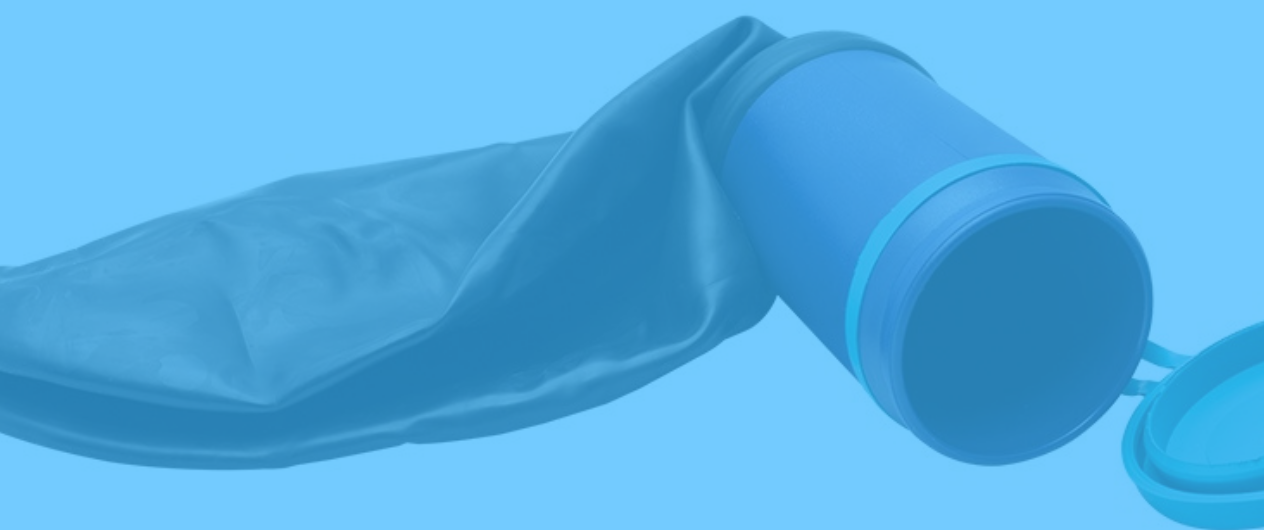

---

NÁDOBA NA MOČ URIBAG

Nejprve sejměte krytku a teprve pak vysuňte latexový vak z tuby. Po použití lze Uribag opláchnout mýdlovou vodou.

Jakmile je Uribag vyprázdněn a opláchnut, může být latexový vak znovu zasunut do trubice a víčko nasazeno.

Z důvodů hygieny se doporučuje, abyste si Uribag používali výhradně pro vlastní potřebu.

Kdokoli s přecitlivělostí na latex by se měl vyhnout použití Uribagu.

Uribag by měl být pokud možno chráněn před vystavením ultrafialovému světlu (denní a sluneční záření) a mastným látkám.

Uribag je určen pouze k močení a neměl by být používán k žádnému jinému účelu.

Uribag má maximální obsah přibližně 1 200 cm<sup>3</sup>.

Vložka je vyrobena z latexu, 100% přírodního produktu.

V případě častého používání může dojít k dřívějšímu opotřebení.

Patentovaný

Ochranná značka Alkmaar č. 37069793



**AKTIV Zdravotnické potřeby s.r.o.**

Sídlo: Lannova 2061/8, 110 00 Praha

Sklad a výdejna: Pamětice 17, 397 01 Drhove u Písku

+420 608 100 717, 380 427 000, 777 601 953

info@aktivpisek.cz

www.aktivpisek.cz