

Toaletní nástavec Trilett 2

Model: 3011492

Návod k montáži a použití

VÝZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ

Barevně zvýrazněné bezpečnostní pokyny je bezpodmínečně nutné respektovat!


- ☞ Tento symbol označuje upozornění a doporučení
- [] Odkaz na číslo obrázku
- () Odkaz na funkční prvek uvnitř obrázku.

ÚVOD

Před prvním uvedením do provozu si tento dokument přečtete a řiďte se jím. Děti a mladiství by si tento dokument měli před prvním použitím případně přečíst spolu s rodiči či doprovázející osobou.

Tento návod k obsluze vám pomůže osvojit si manipulaci s produktem a způsob, jak zaměřit úrazům.

Tento výrobek je technickou pomůckou. Vyžaduje vysvětlení, pravidelnou péči a při nesprávném používání v sobě skrývá určitá nebezpečí. Proto je nutné naučit se s ním správně zacházet.

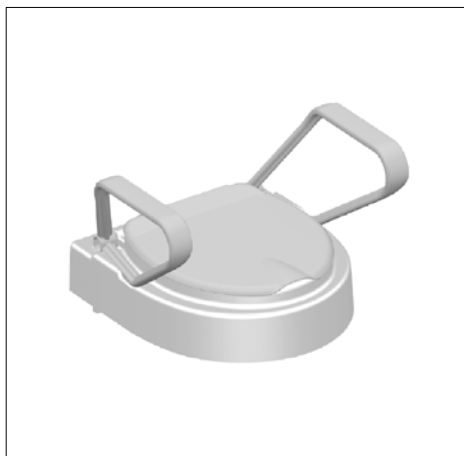

Uživatelé se zrakovým postižením naleznou soubory ve formátu PDF spolu s dalšími informacemi o našich výrobcích na naší webové stránce na adrese:

< www.meyra.com >.

☞ V případě potřeby se obraťte na svého prodejce.

Informace o bezpečnosti výrobku a možném stahování našich výrobků z trhu naleznete v odkazu < Infozentrum > na naší webové stránce:

< www.meyra.com >.

Výrobek splňuje požadavky normy EN 12182 na technické pomůcky pro osoby s handicapem. To zahrnuje požadavky na zápalnost materiálů použitých na čalounění a odpovídajícím způsobem také plasty podle EN 1021-2.

POPIS

Výšku toaletního nástavce TRILETT 2 je možné nastavit do tří poloh, takže je možné nástavec přizpůsobit různé tělesné výšce uživatelů.

Odklopné a odnímatelné opěrky rukou usnadňují sedání a vstávání. Nástavec se zafixuje v zadních upevňovacích otvorech na keramické míse toalety.

POUŽITÍ

V případě alergických reakcí, zčervenání pokožky a/nebo otlaků při používání výrobku vyhledejte neprodleně lékaře.

Tento výrobek slouží osobám s omezenou mobilitou k usnadnění používání většiny záchodových mís.

PŘEVZETÍ

Všechny výrobky kontrolujeme, zda nemají žádné vady, a balíme je do speciálních kartonů.

- ☞ Přesto bychom vás chtěli požádat, abyste výrobek okamžitě po obdržení, nejlépe ještě v přítomnosti doručitele, zkontrolovali, zda nevykazuje škody způsobené přepravou.
- ☞ Obal produktu byste měli uschovat pro případnou později nutnou přepravu.

ŽIVOTNOST

U tohoto produktu předpokládáme očekávanou průměrnou životnost 4 let, pokud se produkt používá k určenému účelu a jsou dodržovány veškeré předpisy pro údržbu a servis.

Životnost vašeho produktu závisí jak na četnosti používání a prostředí, v němž ho používáte, tak na péči.

Použitím náhradních dílů lze životnost produktu prodloužit. Náhradní díly bývají zpravidla k dostání až 5 let po ukončení výroby.

- ☞ Uvedená životnost nepředstavuje žádnou dodatečnou záruku.

ROZSAH DODÁVKY

Toaletní nástavec Trilet 2:

- (1) 1x toaletní nástavec
 - (2) 1x opěrka ruky pravá
 - (3) 1x opěrka ruky levá
- 1x návod k montáži a použití

MONTÁŽNÍ NÁVOD

- ☞ Následující montáž musí provádět odborný servis.

Bezpečnostní pokyny

Během celé montáže dávejte pozor na místa, kde hrozí přiskřípnutí. – Nebezpečí zhmždění!
Pracovní oblast udržujte během montáže v čistotě!

Toaletní nástavec

Toaletní nástavec se dodává předmontovaný v prostředním výškovém nastavení. Opěrky rukou se nasazují samostatně.

1. Odmontujte sedátko a víko vaší toalety.
2. Obě upevňovací závitové tyče přizpůsobte rozměrům otvoru vaší toaletní mísy [1 na straně 11].
3. Posunutím do strany umístěte toaletní nástavec na střed keramické mísy.
4. Nástavec zafixujte upevňovacími matičkami na míse [2 na straně 11].

Pozor:

- ! Ujistěte se, zda jsou všechny šroubové a ostatní spoje pevné.

Opěrky rukou

1. Nasadte opěrky rukou na horní hraně vlevo a vpravo do připravených úchytů [3 na straně 11] + [4 na straně 11]. Nyní opěrky rukou sklopte dolů.
- ☞ Při demontáži odklopte opěrky rukou natolik dozadu, aby se daly vytáhnout stranou z úchytů.

NASTAVENÍ VÝŠKY

Nastavování výšky se provádí vzadu rovnoměrným přemístěním [5 na straně 11] příčné tyče a vpředu přemístěním dosedacích prvků [6 na straně 11].

1. Odstraňte zadní krytky. Stiskněte proto pružné klipsy a krytku posuňte nahoru a sejměte ji.
2. Vhodným šroubovákem uvolněte zadní šrouby [5 na straně 11] příčné tyče a rukou ji zašroubujte do požadované polohy.
3. Nyní nasadte obě krytky. Sledujte označení na vnitřní straně krytek (L = levá a R = pravá).
4. Nyní vytáhněte oba přední dosadací prvky [6 na straně 11] ze stávající polohy a nasadte je do nové požadované polohy. Protiskluzová vrstva se při tom nachází na straně ke keramické míse.

Pozor:

- ! Zajistěte, aby dosedací prvky byly správně zaskočené.

NÁVOD K POUŽITÍ

Bezpečnostní pokyny

Nestoupejte/nesedejte si na víko.

Opírejte se rovnoměrně oběma rukama o opěrky rukou.

Zajistěte, aby výška byla nastavená rovnoměrně.

Dbejte na pevné připevnění ke keramické míse toalety, přišroubování příčné tyče a na bezpečné usazení předních dosedacích prvků.

Poškozené díly okamžitě nechejte u svého prodejce vyměnit.

Nesahejte rukama do oblasti, kde dosedají opěrky rukou. – Nebezpečí zhmoždění!

Před každým použitím se ujistěte, že opěrky rukou jsou bezchybně zaskočené.

Před použitím se přesvědčte, zda je produkt v použitelném stavu. – Nebezpečí úrazu!

Opěrky rukou nesmí být znečištěné olejem nebo tuky. – Nebezpečí úrazu!

Mýdlo a sprchové gely zvyšují nebezpečí ukouznutí!

Firma MEYRA neručí ve smyslu odpovědnosti za výrobek za škody nebo rizika, které v souvislosti s výrobkem způsobí děti bez dozoru!

Čištění

K čištění používejte nejlépe mýdlový roztok. Čisticí prostředek by v každém případě měl mít hodnotu pH min. 6 (neutrální čistič).

Nepoužívejte prostředky obsahující rozpouštědla.

Dezinfekce

Jestliže výrobek používá více osob (např. v pečovatelském ústavu), je předepsaná aplikace běžných dezinfekčních prostředků.

Před dezinfekcí produkt vyčistěte.

Dezinfekce postřikem nebo otěrem je povolena s odzkoušenými a schválenými dezinfekčními prostředky.

Seznam dezinfekčních prostředků a metod odzkoušených a uznaných Institutem Roberta Kocha naleznete na adrese:

< <http://www.rki.de> >.


Při používání dezinfekčních prostředků se může stát, že podle okolností povrchy jejich působením trpí, což může omezit dlouhodobou funkčnost konstrukčních dílů.

Řiďte se zde pokyny k použití od výrobce.

Opravy

Používejte výlučně originální náhradní díly. Využívejte servisní služby vašeho školeného prodejce.

LIKVIDACE

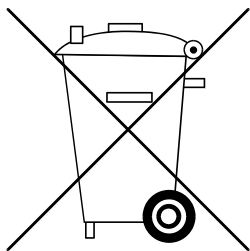

Likvidace se musí provádět podle příslušných národních zákonných ustanovení.

Informace o místních firmách zabývajících se likvidací odpadů získáte na městském či obecním úřadě.

ÚDRŽBA

Nedostatečná nebo zanedbaná péče a údržba výrobku vede k omezení odpovědnosti výrobce.

Údržba

Níže uvedený plán údržby představuje vodítko k provádění údržbových prací.

- ☞ Nelze ho považovat za skutečně nutný rozsah prací zjištěných na výrobku.

Plán údržby

KDY	CO	POZNÁMKA
Před použitím	Zkontrolujte, zda toaletní nástavec není poškozený.	Kontrolu proveďte sami nebo ji provede další osoba. Při deformaci nebo vzniku prasklin se urychleně obraťte na odborný servis kvůli provedení opravy. – Nebezpečí úrazu!
Před použitím	Zkontrolujte víko a opěrky rukou, zda nejsou poškozené.	Kontrolu proveďte sami nebo ji provede další osoba. Při deformaci nebo vzniku prasklin se urychleně obraťte na odborný servis kvůli provedení opravy. – Nebezpečí úrazu!
Po použití	Čištění	Čištění proveďte sami nebo ho provede další osoba.
Každé 6 měsíce (podle četnosti používání)	Zkontrolujte nepoškozenost opěrek rukou a pevnost šroubových spojů.	Kontrolu proveďte sami nebo ji provede další osoba.
Doporučení výrobce: Každé 12 měsíce (podle četnosti používání)	Bezpečnostní prohlídka	Musí provádět prodejce.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model:

Toaletní nástavec 3011492

Délka	52 cm
Šířka	57 cm
Výška	35 cm
Nastavení výšky	8 / 11 / 14 cm
Výška opěrek rukou	20 cm
Nosnost	130 kg
Hmotnosti	3,6 kg
max. teplota vody k čištění	80 °C
Barva	bílá

Typový štítek


Typový štítek se nachází zevnitř na stěně nástavce.

Nářadí

Pro nastavování a údržbářské práce potřebujete toto nářadí:

Křížový šroubovák

Význam štítků na výrobku

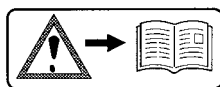

Pozor!

Přečtěte si návod k obsluze i příloženou dokumentaci.

Upozornění na nebezpečí zhmotnění. – Nesahejte dovnitř



Význam symbolů na typovém štítku



Výrobce



Objednací číslo



Sériové číslo



Datum výroby (rok – kalendářní týden)



Přípust. hmotnost uživatele



Přípust. celková hmotnost

RUČENÍ / ZÁRUKA

Za tento výrobek přebíráme v rámci našich všeobecných obchodních podmínek zákonnou záruku a případně vyslovená či dohodnutá ručení. V případě záručních nároků se s níže uvedeným ZÁRUČNÍM KUPÓNEM s vyplněnými potřebnými údaji o označení modelu, čísle dodacího listu s datem dodávky a sériovým číslem (SN) obraťte na vašeho prodejce.

Sériové číslo (SN) naleznete na typovém štítku.

Předpokladem pro uznání nároků z ručení resp. záruky je v každém případě používání výrobku podle účelu určení, používání originálních náhradních dílů u prodejců a pravidelné provádění údržby a prohlídek.

Záruka je vyloučena u poškození povrchové úpravy, pneumatik kol, poškození kvůli uvolněným šroubům nebo maticím a opotřebeným upevňovacím otvorům v důsledku častých montážních prací.

Dále jsou vyloučeny škody na pohonu a elektronice, které jsou následkem nepřiměřeného čištění pomocí parních čističů resp. úmyslného nebo neúmyslného namočení komponent.

Poruchy způsobované zdroji záření jako jsou mobilní telefony s vysokým vysílacím výkonem, hi-fi zařízení a jiné silné rušivé zařízení mimo specifikace normy nelze uplatnit jako nároky z ručení resp. záruky.

Pozor:

- ! Nerespektování návodu k použití, neodborně prováděná údržba a zejména technické změny a doplňky (nástavby) bez našeho souhlasu vedou k zániku jak záručních nároků, tak k ručení za výrobek všeobecně.

Upozornění:

Tento návod k použití je součástí výrobku a při změně uživatele či majitele se proto musí k výrobku přiložit.

Technické změny ve smyslu pokroku si vyhrajujeme.



Tento výrobek je ve shodě se směrnicí ES 93/42/EHS pro zdravotnické výrobky.

POTVRZENÍ O PROHLÍDCE

Údaje o výrobku:

Model:

Č. dodacího listu:

Sériové č. (SN):

Doporučená bezpečnostní prohlídka 1. rok (nejpozději každých 12 měsíců)

Razítko prodejce:

Podpis: _____

Místo, datum: _____

Příští bezpečnostní prohlídka za 12 měsíců

Datum: _____

Doporučená bezpečnostní prohlídka 2. rok (nejpozději každých 12 měsíců)

Razítko prodejce:

Podpis: _____

Místo, datum: _____

Příští bezpečnostní prohlídka za 12 měsíců

Datum: _____

Doporučená bezpečnostní prohlídka 3. rok (nejpozději každých 12 měsíců)

Razítko prodejce:

Podpis: _____

Místo, datum: _____

Příští bezpečnostní prohlídka za 12 měsíců

Datum: _____

Doporučená bezpečnostní prohlídka 4. rok (nejpozději každých 12 měsíců)

Razítko prodejce:

Podpis: _____

Místo, datum: _____

Příští bezpečnostní prohlídka za 12 měsíců

Datum: _____

Záruční kupón

Vyplňte prosím! V případě potřeby zkopírujte a kopii pošlete vašemu prodejci.

Ručení / Záruka

Označení modelu:

Č. dodacího listu:

SN (viz typový štítek):

Datum dodávky:

Razítko prodejce:

Potvrzení o prohlídce při předání vozíku

Údaje o výrobku:

Sériové č. (SN):

Model:

Č. dodacího listu:







Razítko prodejce:

Podpis: _____

Místo, datum: _____

Příští bezpečnostní prohlídka za 12 měsíců

Datum: _____

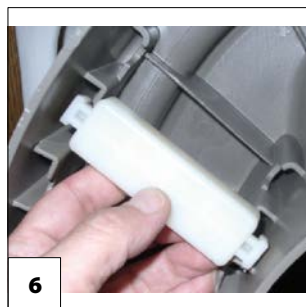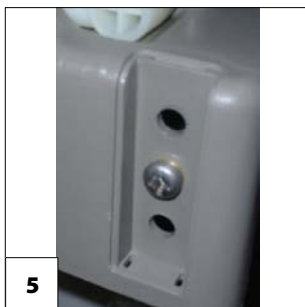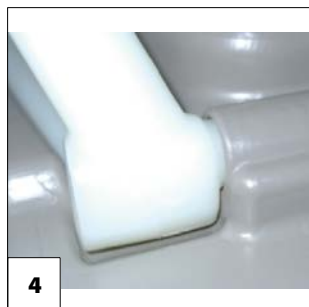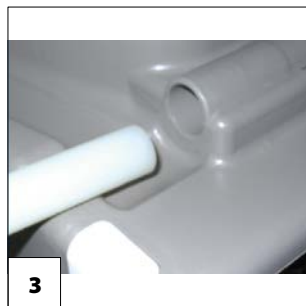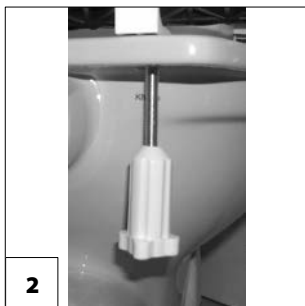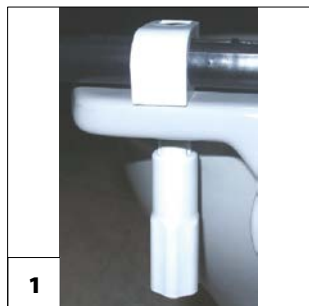

Váš prodejce

Distributor pro ČR

MEYRA ČR s.r.o.

Sídlo: Hrusická 2538/5, 141 00 Praha 4

tel. 272 761 102, mail: meyra@meyra.cz

Pobočky: Ostrava, Janské Lázně, České
Budějovice, Brno, Liberec, Plzeň

www.meyra.cz

Výrobce: MEYRA GmbH



Meyra-Ring 2

D-32689 Kalletal-Kalldorf



Tel +49 5733 922 - 311

Fax +49 5733 922 - 9311



info@meyra.de

www.meyra.de
