



Manuální vozík s textilním sedákem

NÁVOD K OBSLUZE




Distributor: **SENIOR VIA s.r.o.**
Ocelářská 891/16, 190 00 Praha 9, www.seniorvia.cz
Dovozce: M.C.K. IMPORT s.r.o., Kaprova 14/13, 110 00 Praha 1



SV032002U

Při pohybu dolů z příkrého, nebo nahoru do příkrého svahu, dbejte na to, aby doprovázející osoba byla v těsné blízkosti vozíku. V opačném případě by se vozík mohl převrátit. Při pohybu dolů z příkrého svahu by měl být vozík natočen směrem do svahu a doprovázející osoba by měla opatrně s vozíkem zacouvat dolů.

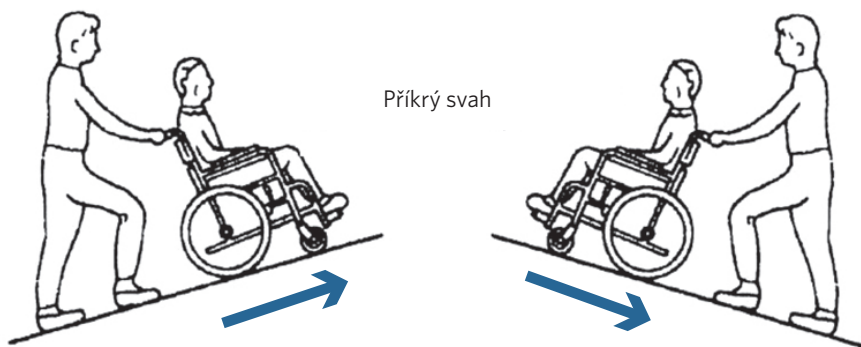

! Bezpečnostní upozornění

- ▶ Před používáním manuálního vozíku si pečlivě přečtěte návod k použití.
- ▶ Zvedání předmětů ze země může být pro uživatele sedícího na vozíku nebezpečné, protože posunutím těžiště může dojít k převrácení vozíku a zranění uživatele.
- ▶ Brzdy se nepoužívají ke snížení rychlosti vozíku. Zatáhnutí brzd vozíku v pohybu může být pro uživatele nebezpečné.
- ▶ Brzdy používejte vždy, i v případě, že zastavujete jen na krátkou dobu.
- ▶ Vždy mějte na paměti bezpečnost. Pokud se osoba se sníženou mobilitou necítí dobře při samostatném ovládní vozíku, měla by požádat o doprovod.
- ▶ Nesedejte na vozík, pokud není zcela rozložen.

Údržba

Vozík lze čistit a udržovat běžnými čistícími prostředky vhodnými pro čištění daných materiálů tzn. PVC a kovu, které neobsahují rozpouštědla. Vždy dokonale osušte. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, stav koleček a paprskových kol, polohu aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí. V případě nutnosti vyměňte opotřebovaná kolečka i paprsková kola.


Záruka

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než prodávajícím.

Manuální vozík s textilním sedákem SV032002U

Ocelová konstrukce s textilním sedákem a opěrkou, 8" PVC kolečka a 24" paprsková kola.

Manuální vozík s textilním sedákem je určen jako kompenzační pomůcka pro tělesně postižené osoby a pro osoby se sníženou schopností mobility. Použít ho může jak uživatel sám, tak s pomocí druhé osoby.

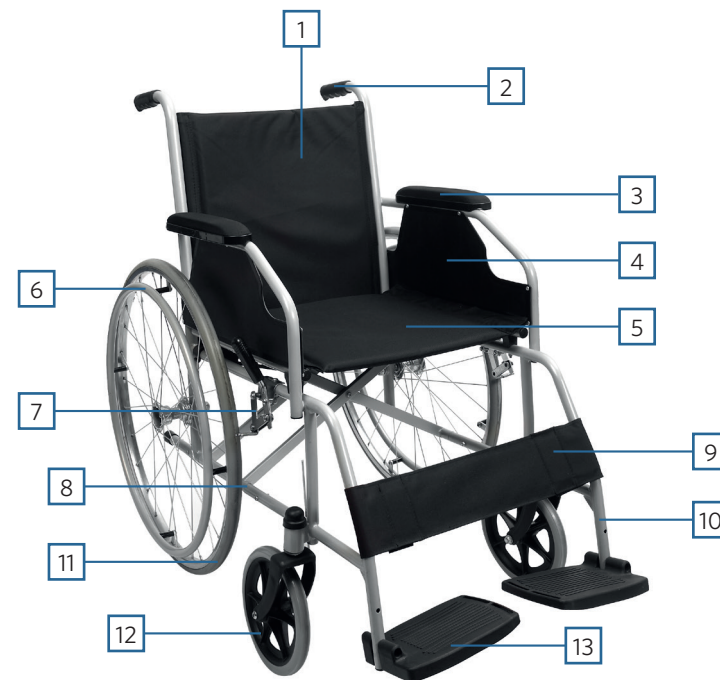

1. Opěrka zad
2. Madlo
3. Loketní opěrka
4. Boční panel
5. Sedadlo
6. Ruční ráfek
7. Brzda
8. Sklápěcí tyč
9. Opěrka nohou
10. Závěs podnožky
11. Paprskové kolo
12. PVC kolečko
13. Podnožka


Rozměry (cm)	Model	66	28	45	60	20	48	87	101	40	40	(kg)	NW GW
	SV032002U											100	12,7/14,9

Upozornění

**Vhodnost použití vozíku konzultujte s ošetřujícím lékařem.
Nevhodné pro osoby s hmotností vyšší než 100 kg.**


Rozložení vozíku

1. Vozík postavte na kola.
2. Postavte se za vozík.
3. Uchopte madla [2] a táhněte je do stran.
4. Poté zatlačte sedadlo [5] směrem dolů.

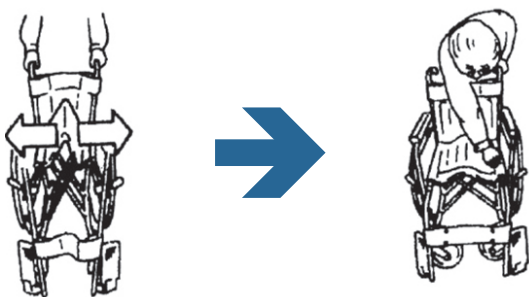


Složení vozíku

1. Otočte podnožky [13] směrem nahoru.
2. Postavte se z boku k vozíku a uchopte sedadlo [5] oběma rukama dle obrázku.
3. Táhněte sedadlo [5] nahoru, dokud nebude vozík zcela složen.

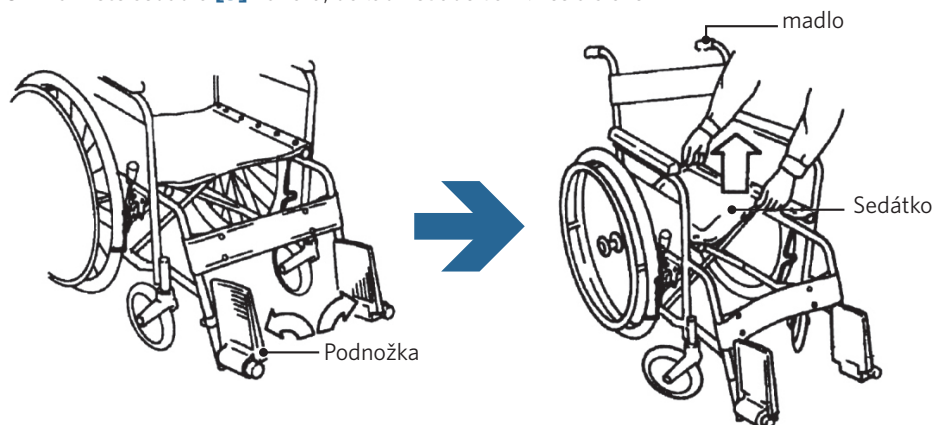


Podnožka

Před nasedáním a vysedáním se ujistěte, že podnožky [13] nejsou sklopeny. Sklopte je, až po nasednutí na vozík. Pokud byste stoupli při nasedání či vysedání na podnožku, hrozí překlacení vozíku a jeho pád. Před tím, než se s osobou na vozíku rozjedete, ujistěte se, že má obě nohy na podnožkách.

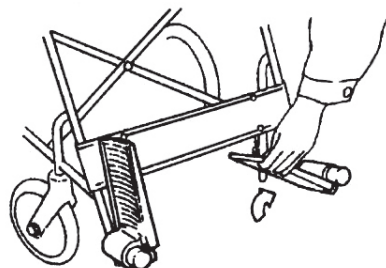

Použití brzdy

Brzdy [7] jsou na obou stranách vozíku. Brzdí se pomocí páky, kterou posunete směrem od paprskového kola [11], k odbrždění vraťte páku do vzpřímené polohy. Před nasedáním a vysedáním mějte vozík vždy zabrzděný. Sílu brzdícího účinku je možné přizpůsobit povolením šroubu, kterým je brzda připojena k rámu vozíku a nastavení brzdy do požadované polohy. Po nastavení šroub pevně utáhněte. Je velmi důležité zkontrolovat účinnost brzd před použitím vozíku.

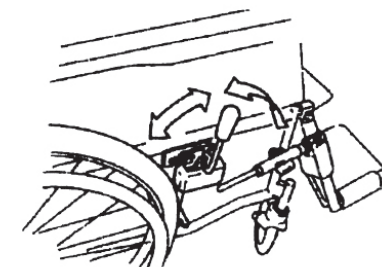


Použití vozíku

Uživatel vozíku může použít ruční ráfek [6] k manipulaci s vozíkem libovolným směrem. Je důležité, aby uživatel používal jenom ruční ráfky nikoli kola, které by mohly způsobit úraz uživatele.

Vozík může vést i doprovázející osoba, která musí vždy stát za vozíkem a k manipulaci používat pouze madla [2], nikoli ruční ráfky. Navíc, z vnější strany na opěrce zad [1] je kapsa, která může sloužit na uložení drobných předmětů.

Pro zvednutí vozíku na schod musí doprovázející osoba šlápnout na sklápěcí tyč [8] a zatlačit madla směrem dolů, tak se přední kolečka zvednou na schod. Poté vytáhněte vozík za madla [2] směrem nahoru, aby se zvedla i paprsková kola. Nesnažte se přejíždět schody silou.

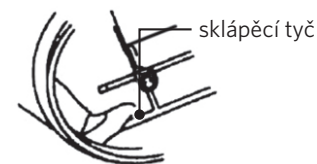



Manuálny vozík s textilným sedadlom

NÁVOD NA OBSLUHU



Distributor: **SENIOR VIA s.r.o.**
Ocelářská 891/16, 190 00 Praha 9, www.seniorvia.cz
Dovozce: M.C.K. IMPORT s.r.o., Kaprova 14/13, 110 00 Praha 1




SV032002U




Rozloženie vozíka

1. Vozík postavte na kolesá.
2. Postavte sa za vozík.
3. Uchopte rukoväťe [2] a ťahajte ich do strán.
4. Potom zatlačte sedadlo [5] smerom nadol.

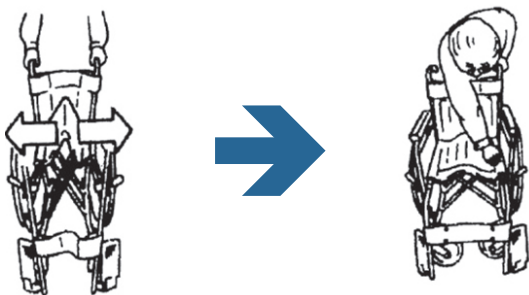


Zloženie vozíka

1. Otočte podnožky [15] smerom nahor.
2. Postavte sa z boku k vozíku a uchopte sedadlo [5] oboma rukami podľa obrázku.
3. Ťahajte sedadlo [5] hore, pokiaľ nebude vozík úplne zložený.

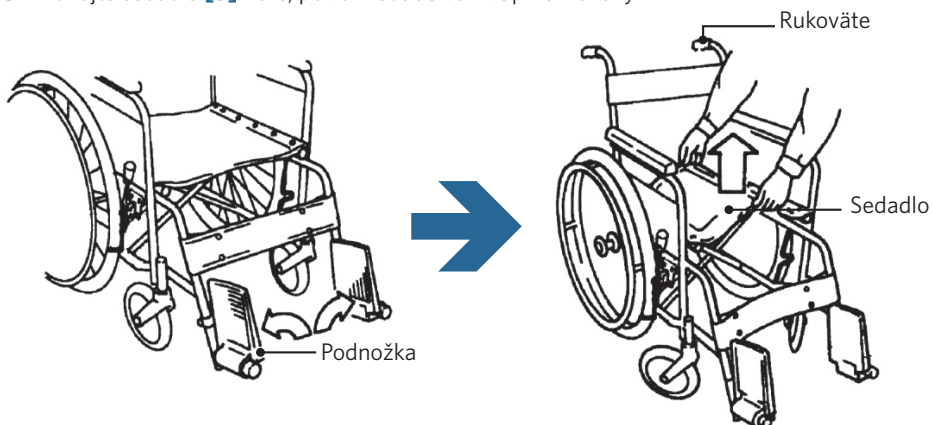


Podnožka

Pred nasadaním a vysadaním sa uistite, že podnožky [13] nie sú sklopené. Sklopte ich, až po nasadnutí na vozík. Pokiaľ by ste stúpili pri nasadaní či vysadaní na podnožku, hrozí preklopenie vozíka a jeho pád. Pred tým, než sa s osobou na vozíku rozbehnete, uistite sa, že má obe nohy na podnožkách.

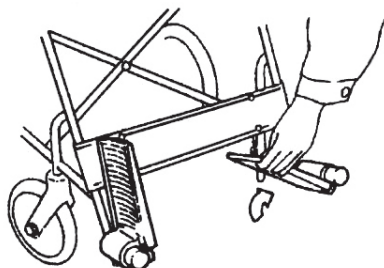

Použitie brzd


Brzdy [7] sú na oboch stranách vozíka. Brzdí sa pomocou páky, ktorú posuniete smerom od lúčového kolesa [8], na odbrzdzenie vráťte páku do vzpriamenej polohy. Pred nasadaním a vysadaním majte vozík vždy zabrzdzený. Silu brzdiaceho účinku je možné prispôsobiť povolením skrutky, ktorým je brzda pripojená k rámu vozíka a nastavenie brzd do požadovanej polohy. Po nastavení skrutku pevne utiahnite. Je veľmi dôležité skontrolovať účinnosť bzd pred použitím vozíka.

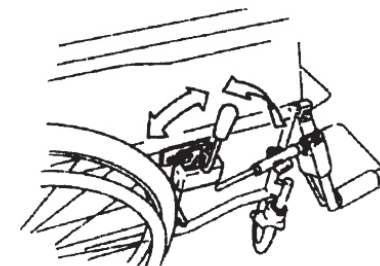


Použitie vozíka

Užívateľ vozíka môže použiť ručný ráfik [6] k manipulácii s vozíkom ľubovoľným smerom. Je dôležité, aby užívateľ používal len ručné ráfiky nie kolesá, ktoré by mohli spôsobiť úraz užívateľa. Vozík môže viesť aj sprevádzajúca osoba, ktorá musí vždy stáť za vozíkom a k manipulácii používať len rukoväťe [2], nie ručné ráfiky. Navyše, z vonkajšej strany na opierke chrbta [1] je vrecko, ktoré môže slúžiť na uloženie drobných predmetov.

Pre zdvihnutie vozíka na schod musí sprevádzajúca osoba stúpiť na sklápaciu tyč [8] a zatlačiť rukoväťe smerom dole, tak sa predné koliesko zdvihne na schod. Potom vyťahnite vozík za rukoväťe [2] smerom nahor, aby sa zdvihli aj lúčové kolesá. Nesnažte sa prechádzať schodami len s použitím sily.

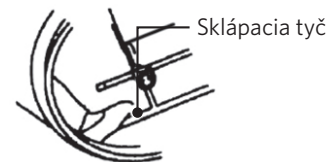

Pri pohybe dolu zo strmého alebo hore do strmého svahu, dbajte na to, aby sprevádzajúca osoba bola v tesnej blízkosti vozíku. V opačnom prípade by sa mohol vozík prevrátiť. Pri pohybe nadol zo strmého svahu by mal byť vozík otočený smerom do svahu a sprevádzajúca osoba by mala opatrne cúvať smerom nadol.

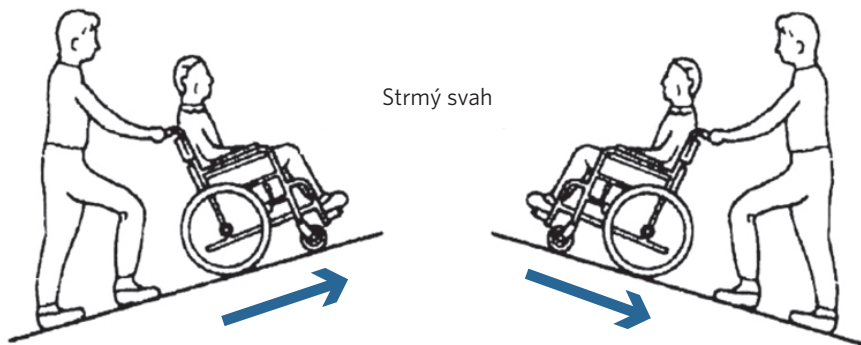

! Bezpečnostné upozornenie

- ▶ Pred používaním manuálneho vozíka si pozorne prečítajte návod na použitie.
- ▶ Zdvíhanie predmetov zo zeme môže byť pre užívateľa sediaceho na vozíku nebezpečné, pretože presunutím ťažiska môže dôjsť k prevráteniu vozíka a zraneniu užívateľa.
- ▶ Brzdy sa nepoužívajú na zníženie rýchlosti vozíka. Zatiahnutie brzdy vozíka v pohybe môže byť pre užívateľa nebezpečné.
- ▶ Brzdy používajte vždy, aj v prípade, že zastavujete len na krátku dobu.
- ▶ Vždy majte na pamäti bezpečnosť. Ak sa osoba so zníženou mobilitou necíti dobre pri samostatnom ovládaní vozíka, mala by požiadať o doprovod.
- ▶ Nesadajte si na vozík, pokiaľ nie je úplne rozložený.

Údržba

Vozík je možné čistiť a udržiavať bežnými čistiacimi prostriedkami vhodnými na čistenie daných materiálov tzn. PVC a kovu, ktoré neobsahujú rozpúšťadlá. Vždy dokonalo osušte. Pre zachovanie maximálnej funkčnosti a stability odporúčame pravidelne kontrolovať polohu všetkých istiacich prvkov, stav koliesok a lúčových kolies, polohu aretačných poistiek, popr. odstrániť mechanické nečistoty všetkých častí. V prípade nutnosti vymeňte opotrebovaná kolieska i lúčové kolesá.


Záruka

Záruku poskytujeme po dobu 24 mesiacov a nevzťahuje sa na poškodenie vplyvom nesprávneho používania a opotrebenie, spôsobené obvyklým užívaním. Záruka zaniká tiež pri akejkoľvek úprave, oprave, nastavení alebo výmene akejkoľvek časti iným subjektom, ako predávajúcim.

Manuálny vozík s textilným sedadlom SV032002U

Oceľová konštrukcia s PVC sedákom a opierkou, 8" PVC kolieska a 24" lúčové kolesá.

Manuálny vozík s textilným sedadlom je určený ako kompenzačná pomôcka pre telesne postihnuté osoby a pre osoby so zníženou schopnosťou mobility. Použití ho môže ako užívateľ sám, tak s pomocou druhej osoby.

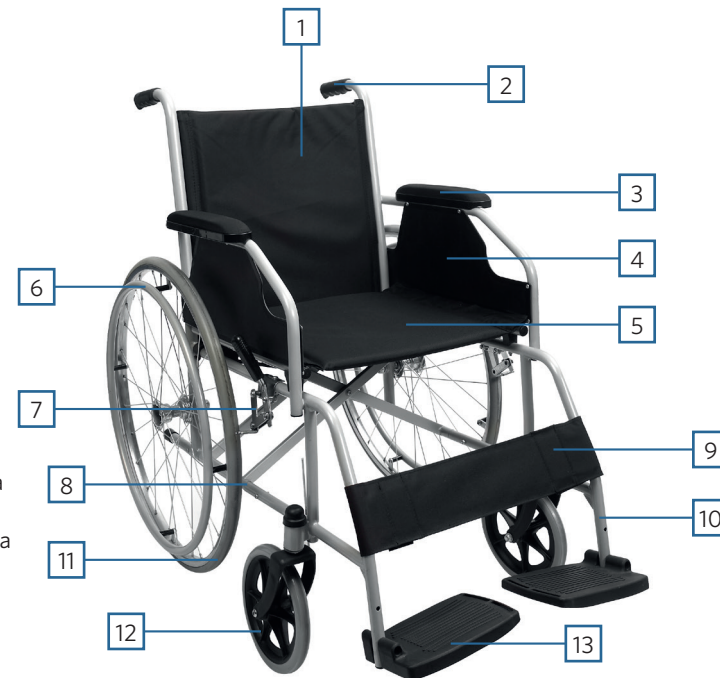

1. Opierka chrbta
2. Rukoväť
3. Lakťová opierka
4. Bočný panel
5. Sedadlo
6. Ručný ráfik
7. Brzda
8. Sklápacia tyč
9. Opierka nohou
10. Uchytenie podnožky
11. Lúčové koleso
12. PVC koliesko
13. Podnožka

Rozmery (cm) Model	66	28	45	60	20	48	87	101	40	40	(kg)	NW GW
SV032002U	66	28	45	60	20	48	87	101	40	40	100	12,7/14,9

Upozornenie

**Vhodnosť používania vozíka konzultujte s ošetrojúcim lekárom.
Nevhodné pre osoby s hmotnosťou vyššou ako 100 kg.**